

2016 年 1 月 13 日

お客様各位

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒108-8507 東京都港区港南 2 丁目 13 番 37 号
営業本部 本部長 安部 美佐子

訴訟提起の報道に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび一部のマスメディアより、トリロジーに関して弊社に対しての訴訟提起の報道がありました。本件に関して多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

このたびの報道を受けまして、現在トリロジーをご使用頂いています皆様に従前よりお伝えしているとおりはありますが、改めて本製品の安全使用に関して下記の通りご案内申し上げます。

謹白

記

1. 該当機種

販売名	一般的名称	承認番号
トリロジー	成人用人工呼吸器	22100BZX01080000
トリロジー 100 plus	成人用人工呼吸器	22600BZX00096000
トリロジー 200 plus	成人用人工呼吸器	22600BZX00100000
トリロジー O2 plus	成人用人工呼吸器	22600BZX00132000

- 電源コードに断線が発生し、電源が遮断された場合においては、まずアラームが発生し電源が遮断された事を警告します。このような場合、別紙のアラームが発生しますので電源コードが正しくコンセントに接続されているか確認ください。
- 万が一、電源コードに断線が発生した場合でも自動的に内部バッテリーに切り替わり、急な作動停止になる事は御座いませんので落ち着いてご対応願います。
- 対応方法にご不明な点が御座いましたら担当の営業所までご連絡願います。
また、機器の取扱およびトラブルに関する、夜間・休日のお問い合わせに関しては、弊社、機器安全センター（0120-633-881）にご連絡願います。
- 電源コードの断線を防ぐために、1) 電源コードの取り外しの際は、コードをもって引き抜くなど無理な力をかけない 2) 電動ベッドや車いす等の可動部分にケーブルが挟まらないようする等取り扱いに注意頂きますようお願いいたします。

以上

安全に弊社製品をご使用頂くために、安全対策を常に見直し、安全性の向上に会社を挙げて努めます。



別紙

以下、AC電源が遮断された際のアラーム一覧（取扱説明書抜粋）

1. AC電源が遮断され代替電源（外部バッテリー、着脱式バッテリー、内蔵バッテリーの順）に切り替わると、中レベルアラームである「AC電源外れ」アラームが鳴る。ボタンが黄色で点滅。「AC電源外れ」メッセージが表示され、使用中のバッテリーの周りにボックスが表示される。装置は作動を続ける。
2. 最後のバッテリーの残量が残り 20 分程度まで低下すると、中レベルアラームである「バッテリー電圧低下」アラームが鳴る。ボタンが黄色で点滅。「○○バッテリー電圧低下」メッセージが黄色で表示。ステータスパネルでは、バッテリーの周りのボックスの内部が黄色になる。装置は作動を続ける。
3. 最後のバッテリーの残量が残り 10 分程度まで低下すると、高いレベルアラームである「バッテリー電圧低下」アラームが鳴る。ボタンが赤色で点滅。「○○バッテリー電圧低下」メッセージが赤色で表示。ステータスパネルでは、バッテリーの周りのボックスの内部が赤色になる。装置は作動を続ける。
4. 最後のバッテリーを使い果たすと、高レベルアラームである「電源消失」アラームが鳴る。ボタンが赤色で点滅、画面には何も表示されない。装置は停止。

その他のアラームが発生した場合は、取扱説明書に記載されています内容にてご対応願います。