

・「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する

・緑色のランプが点滅していれば使用可能な状態です。ランプが消灯している場合は、注意が必要です。また、HS1からピープ音が聞こえiボタンが点滅している場合は、iボタンを押して音声メッセージの指示に従ってください。それでも問題が解決しない場合は、AEDコールセンターへご連絡下さい。

こちらが点滅することを
毎日確認して下さい。
(2～3秒間隔で点滅します)




「スタンバイモード(正常時)」

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

* バッテリー装着セルフテスト (何か問題が起こったら、まずはこちらを行ってください)

・パッドカートリッジが本体に装着されていることを確認の上、バッテリーを装着して下さい。自動的にセルフテストが開始されます。音声メッセージに従って、セルフテストを完了して下さい。次にAEDがスタンバイ状態になることを確認して下さい。

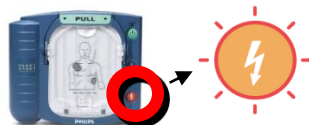

「セルフテストです。緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい。」

「オレンジのボタンが点滅したらボタンを押して下さい。テストは完了しました。テスト中です・・・」

「使用できます。緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい。」