


カフアシスト E70の使い方


※本書は添付文書や取扱説明書にかわるものではありません。
必ず製品に付属の添付文書および取扱説明書をご覧ください。

機器の外観・名称

機器前面

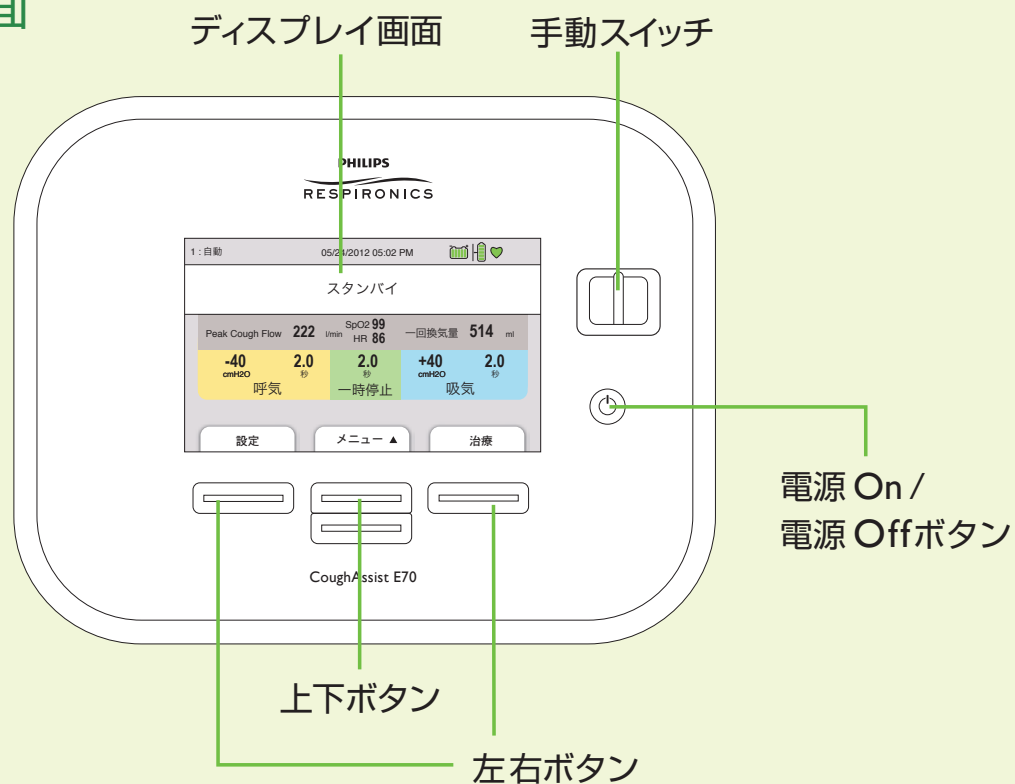


機器背面

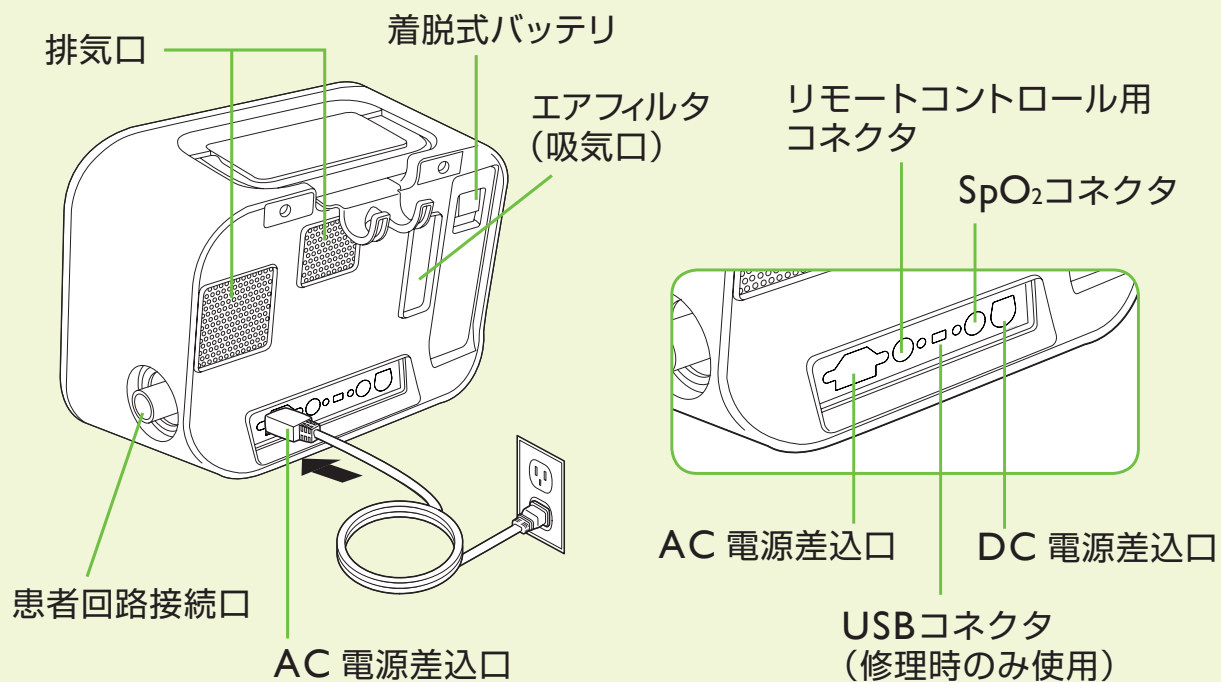

注記: 治療装置にフットペダルを接続した場合は、手動スイッチが無効になります。


ディスプレイアイコン

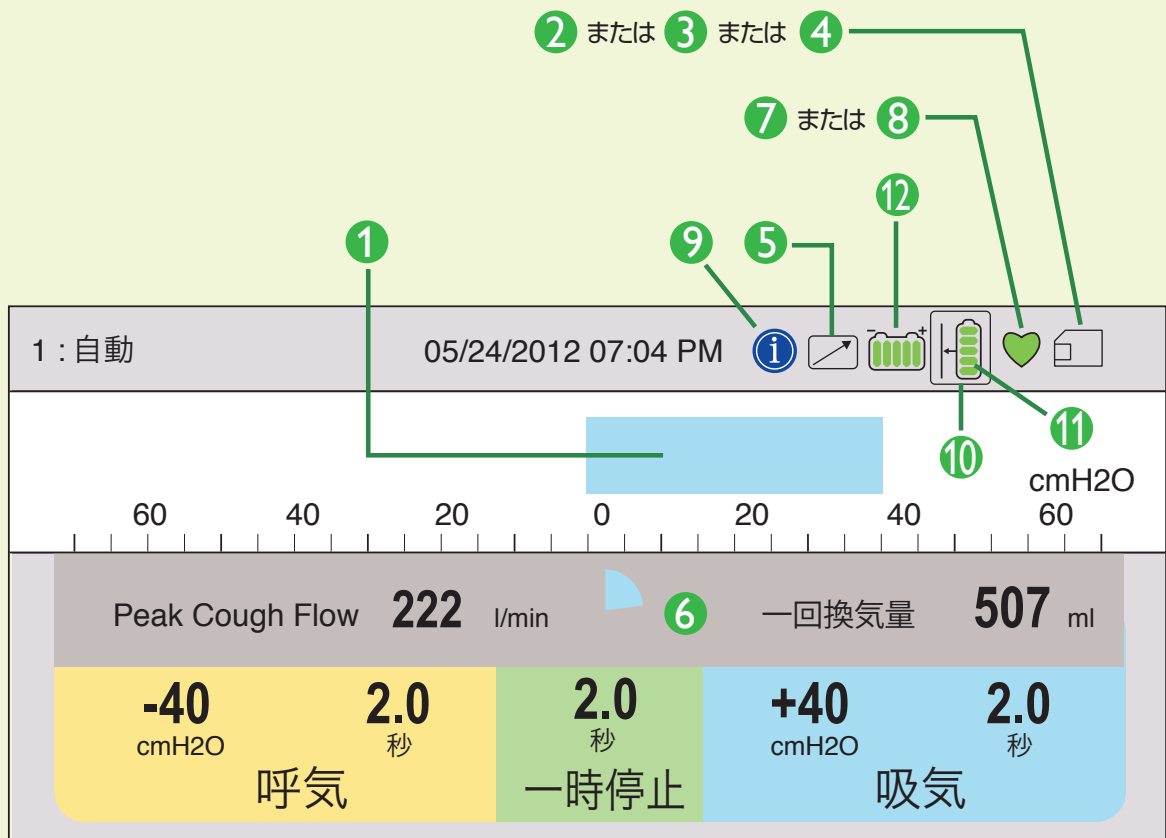

- | | |
|--|---|
| <p>1</p>  <p>緑：一時停止
黄：陰圧（呼気）
青：陽圧（吸気）</p> | <p>7</p>  <p>パルスオキシメーターの接続（緑と白で交互に点滅）</p> |
| <p>2</p>  <p>SDカード挿入</p> | <p>8</p>  <p>オキシメトリーデータに問題がある</p> |
| <p>3</p>  <p>SDカードエラー</p> | <p>9</p>  <p>情報メッセージが情報ログにあるときに表示</p> |
| <p>4</p>  <p>SDカードにデータを書込み中</p> | <p>10</p>  <p>バッテリーを使用中</p> |
| <p>5</p>  <p>リモートコントロール（フットペダル）を接続</p> | <p>11</p>  <p>着脱式バッテリーインジケーター
赤枠：残り数分の容量</p> |
| <p>6</p>  <p>呼吸同調用ダイヤル：
このゲージは自動モードで実行中、各呼吸相の残り時間を視覚的に表示します。</p> | <p>12</p>  <p>外部バッテリーインジケーター
赤枠：残り数分の容量</p> |




呼吸回路の接続


フレキシブルチューブの片方の端にバクテリアフィルタを取り付け、機器の送気口に接続します。反対側のもう一方にアダプタを介しマスクを接続します。

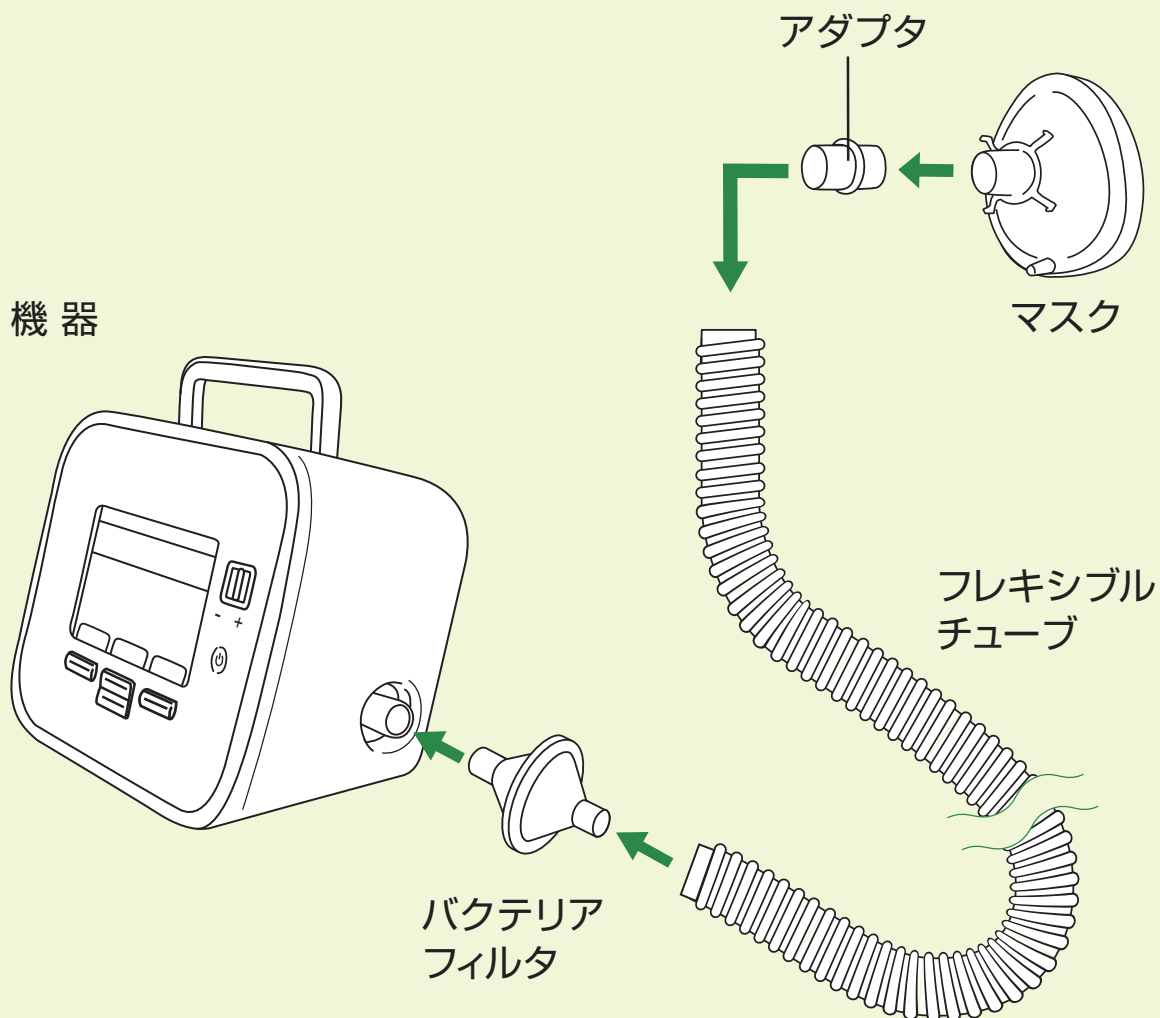

電源のOn



以下の手順で電源をOnにしてください。

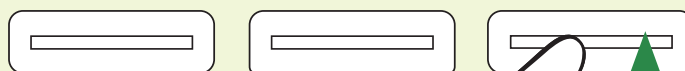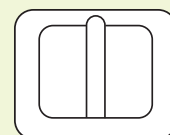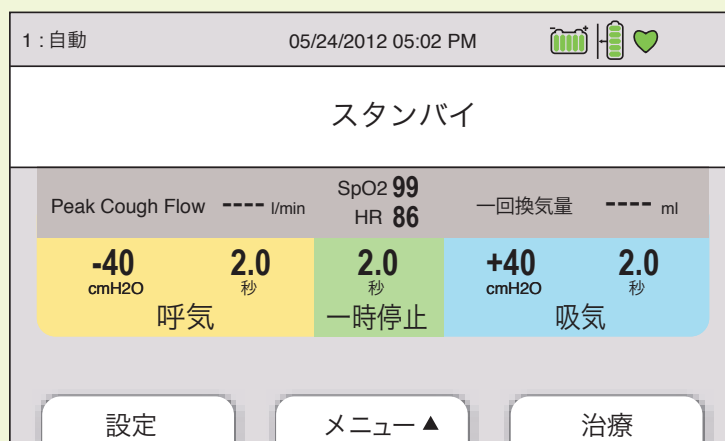


 ボタンを押して電源を On にします。右のボタンを押して「治療」を選択します。「治療」を選択すると装置が作動します。

電源のOff


以下の手順で電源をOffにしてください。

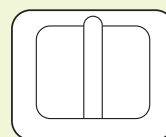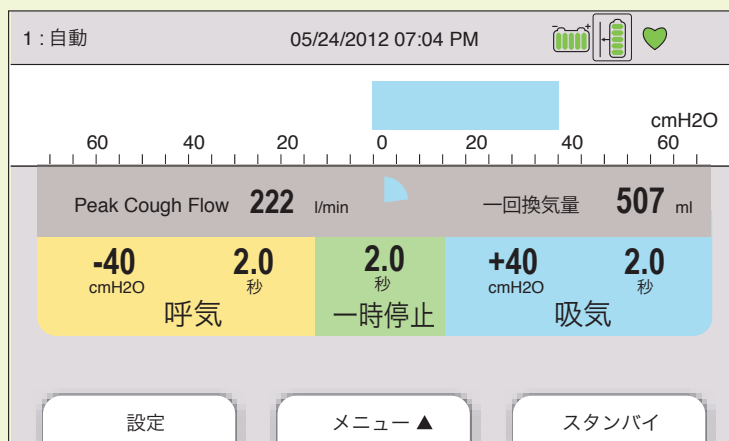

2

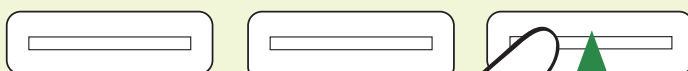


右のボタンを押して「スタンバイ」を選択します。


 ボタンを押して電源をOffにします。

プリセット番号の変更 1


本製品はあらかじめ設定された処方設定グループを簡単に選択することができます。（プリセット1、2、または3が選択できます。）
以下の手順で番号を変更してください。

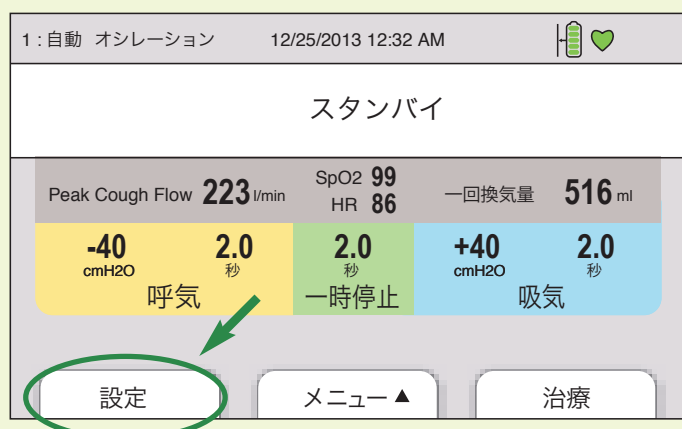

1 **設定** を押して設定画面にアクセスします。

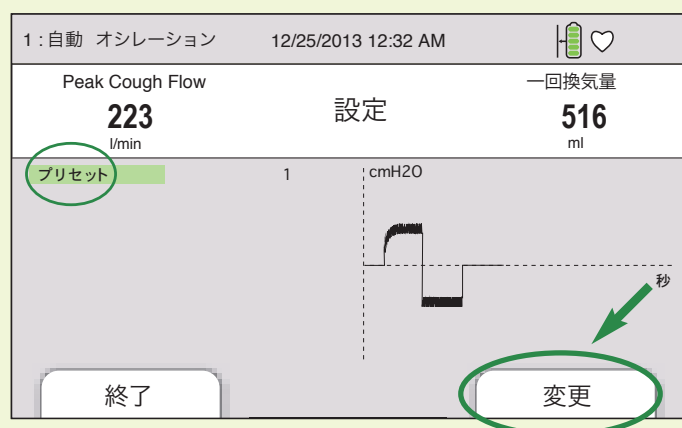


2 プリセットが選択されていることを確認し、**変更** を押します。

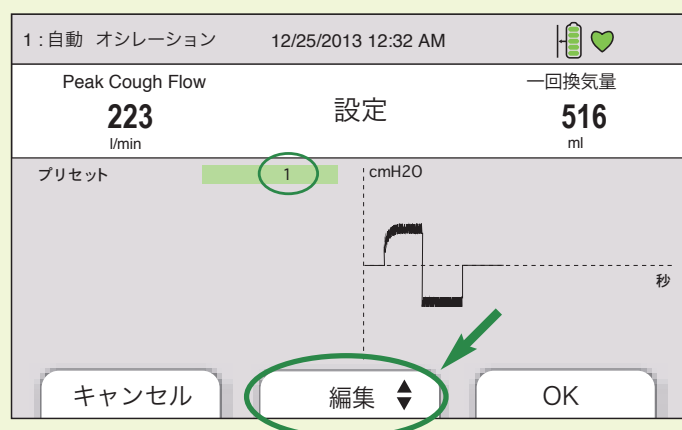


3 **≡** を押し、使用したいプリセット番号に変更します。

プリセット番号の変更 2

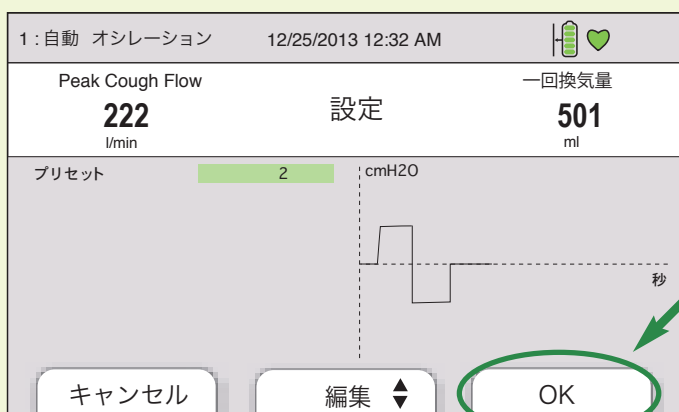

4 OK を押し、変更した設定を有効にします。

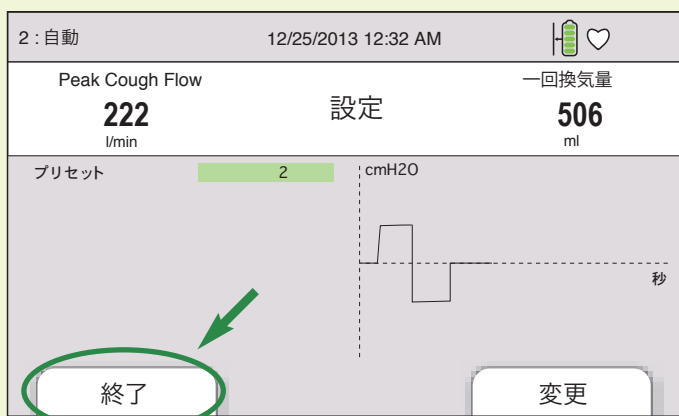


5 終了 を押すと、メイン画面に戻ります。

お手入れ

フレキシブルチューブ、マスク、アダプタ、エアフィルタは定期的
に交換、洗浄が必要です。安全・快適にお使いいただくために、
以下のお手入れを行ってください。


毎使用後

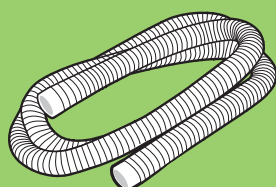

フレキシブル
チューブ



アダプタ

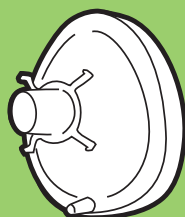

マスク

各部品を分解し、中性洗剤を
うすめたぬるま湯で洗浄し
ます。

よくすすぎ、風通しの良い所
で陰干しします。

2週間



エアフィルタ

フィルタは必ず乾いている物
をご使用ください。


使用後のフィルタは中性洗剤
をうすめたぬるま湯で洗浄し、
陰干ししてください。

お手入れの方法


- 1 フレキシブルチューブ、アダプタ、マスクを、中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗淨します。




- 2 洗剤を流水で十分に洗い流します。

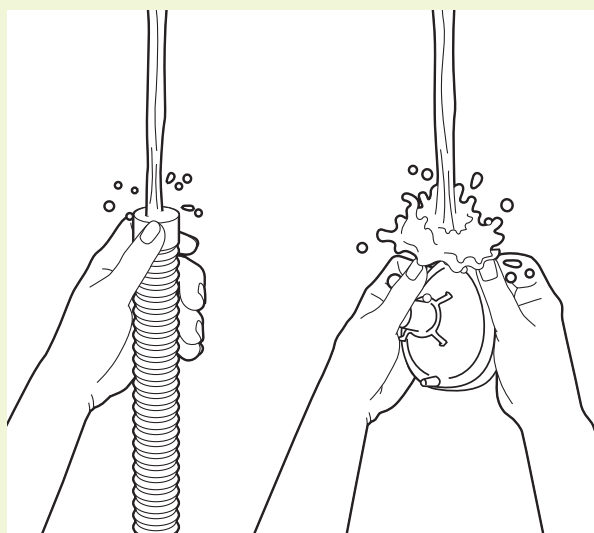

- 3 風通しのよいところで陰干しします。
フレキシブルチューブは吊り下げて、マスクやアダプタはタオルなどの上に置いておく
と良いでしょう。

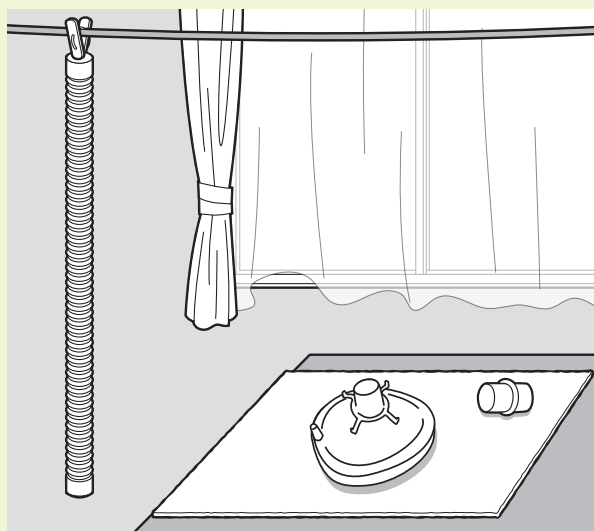


- 4 乾燥後はほこりがつかないように、袋などに入れて保管します。

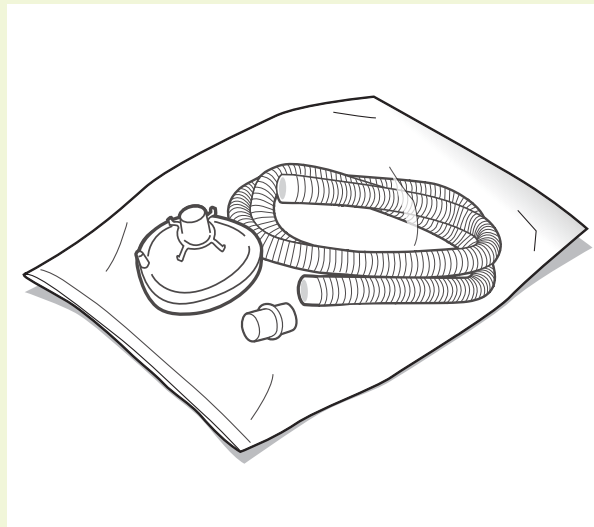


⚠ 次の方法でのお手入れはおやめください

日当たりの良い所で干さないでください。

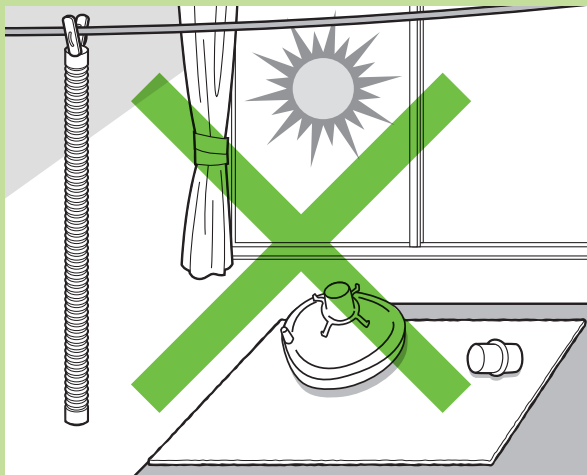


ベンジン、アルコール、塩素系洗剤などで洗わないでください。

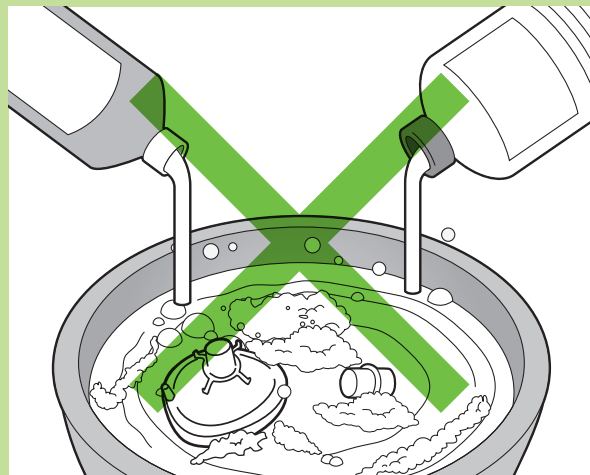


機器の準備

機器の設置

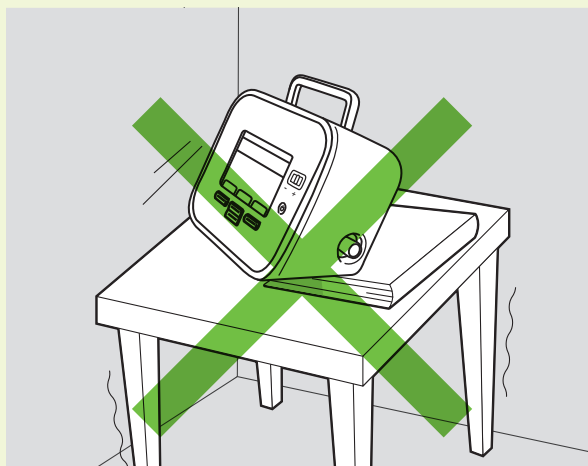

機器をしっかりとした平らな台などに置きます。直射日光があたらない場所に設置してください。

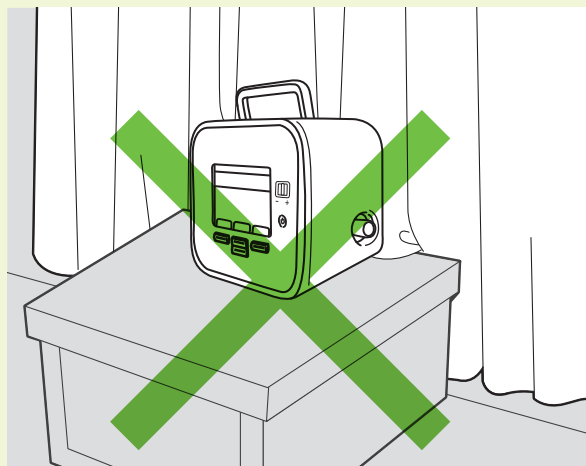

エアフィルタ収納部(吸気口)がカーテンなどでふさがれていないことを確認してください。

機器トラブル発生時の対応

最寄りの弊社営業所や夜間・休日は機器安全センターまでご連絡ください。
(連絡先は下記をご確認ください。)

平日 9:00~18:00の受付

地域営業所・出張所・駐在

夜間・土日休日の受付

(平日18:00~翌9:00、土・日曜日と祝祭日)

機器安全センター

フリーダイヤル **0120-633-881**

MEMO
