



AED日常点検チェックリスト (ハートスタートHS1 Home)

シリアル番号: _____

点検月	月			月			月		
点検担当者名									
バッテリーの使用期限	年 月			年 月			年 月		
パッドの使用期限	年 月 日			年 月 日			年 月 日		
	年 月 日			年 月 日			年 月 日		
外観の確認 (損傷やひびの有無)	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし			<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
確認日	月 日			月 日			月 日		
ステータスインジケータの表示確認 (○か×にて記入してください)	1		16	1		16	1		16
	2		17	2		17	2		17
	3		18	3		18	3		18
	4		19	4		19	4		19
	5		20	5		20	5		20
	6		21	6		21	6		21
	7		22	7		22	7		22
	8		23	8		23	8		23
	9		24	9		24	9		24
	10		25	10		25	10		25
	11		26	11		26	11		26
	12		27	12		27	12		27
	13		28	13		28	13		28
	14		29	14		29	14		29
	15		30	15		30	15		30
		31			31			31	

ステータスインジケータの表示



○: 正常にお使いいただけます



緑のランプが点滅している

×: 確認が必要です。販売店に連絡してください。



緑のランプが消灯しビープ音が鳴る
i ボタンが点滅

販売名: ハートスタート HS1
医療機器承認番号: 21700BZY00426000
特定保守管理医療機器 / 高度管理医療機器
株式会社フィリップス・ジャパン




AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、
AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から
点検することが重要です。



(ハートスタートHS1 Home)

使用準備完了ランプ

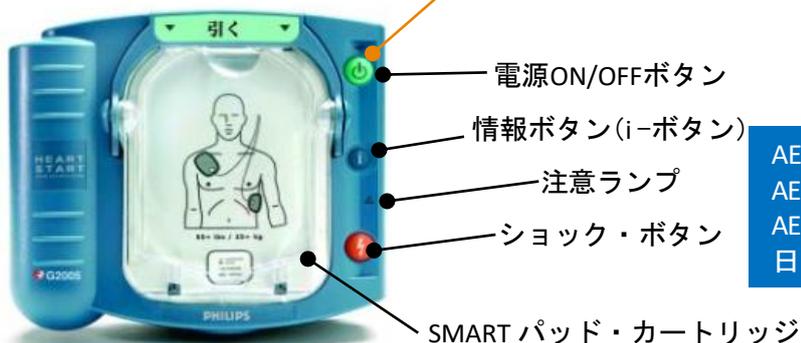

(HS1 Home)

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

使用準備完了ランプを毎日チェック

HS1 Homeでは、毎日のセルフテストが自動実行されます。

- 使用準備完了ランプが点滅している場合：いつでも使用できる状態です。
- 使用準備完了ランプが点灯している場合：使用中またはセルフテスト実行中です。
- 使用準備完了ランプが消えている場合
 - HS1 Home からビープ音が聞こえ、i-ボタンが点滅している:i-ボタンを押して音声ガイドに従ってください。
 - HS1 Home から3回のビープ音が連続して鳴る:弊社AEDコールセンターまでご連絡ください。
 - HS1 Home からビープ音が聞こえず、i-ボタンも点滅しない:バッテリーを装着/交換して、セルフテストを実行します。

使用準備完了ランプが点滅することを確認してください
(3秒間隔で点滅します)



バッテリー装着セルフテスト ※パッド・カートリッジを装着した状態で行ってください

バッテリーをHS1 Home から取り外し、5秒経過してから再装着すると、バッテリー装着セルフテストが実行されます。このテストは非常に詳細なテストで、必要以上に実行するとバッテリーの寿命が短縮されます。以下の場合のみ行ってください。

- AEDの初回使用時
- 傷病者の処置に使用した後
- バッテリー交換後
- AEDが破損した可能性のある場合



バッテリーを再装着後、音声ガイドに従ってください。指示があればボタンを押します。このテストは約1分かかります。1分待つと、「使用できます」のメッセージが聞こえます。