

PHILIPS


Healthcare

ハートスタートFRxシリーズ

点検手順書



SMARTパッド II (ケース入り)

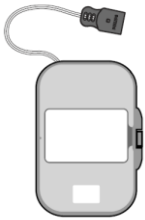

※AED本体に接続した状態で保管してください。

パッド・コネクタ・ポート

小児用キー・スロット



(FRx)



(FRx+ / FRx+e)

使用準備完了ランプ

電源ON/OFFボタン

情報ボタン(i-ボタン)

注意ランプ

ショック・ボタン

使用準備完了ランプを毎日チェック

FRxシリーズでは、毎日のセルフテストが自動実行されます。

- 使用準備完了ランプが点滅している場合: **いつでも使用できる**状態です。
- 使用準備完了ランプが点灯している場合: 使用中またはセルフテスト実行中です。
- 使用準備完了ランプが消えている場合
 - FRxシリーズからビープ音が聞こえ、i-ボタンが点滅している: i-ボタンを押して音声ガイドに従ってください。
 - FRxシリーズから3回のビープ音が連続して鳴る: 当社AEDコールセンターまでご連絡ください。
 - FRxシリーズからビープ音が聞こえず、i-ボタンも点滅しない: バッテリーを装着/交換して、セルフテストを実行します。

使用準備完了ランプが点滅することを確認してください(3秒間隔で点滅します)




AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

バッテリー装着セルフテスト ※パッドを接続した状態で行ってください

バッテリーをFRxシリーズから取り外し、5秒経過してから再装着すると、バッテリー装着セルフテストが実行されます。このテストは非常に詳細なテストで、必要以上に実行するとバッテリーの寿命が短縮されます。

以下の場合のみ行ってください。

- AEDの初回使用時
- 傷病者の処置に使用した後
- バッテリー交換後
- AEDが破損した可能性のある場合

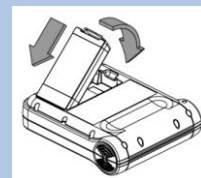

バッテリーを再装着後、音声ガイドに従ってください。指示があればボタンを押します。このテストは約1分かかります。1分待つと、「使用できます」のメッセージが聞こえます。

• FRxシリーズとは、FRx / FRx+ / FRx+e を指しています。

• 出典: ハートスタート FRx 除細動器 取扱説明書、ハートスタート・クイック・セットアップ・ガイド

販売名: ハートスタートFRx
医療機器承認番号: 22000BZX00305000
特定保守管理医療機器/高度管理医療機器