




・「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する

緑色のランプが点滅していれば使用可能な状態です。ランプが消灯している場合は、注意が必要です。また、FRx+からピープ音が聞こえiボタンが点滅している場合は、iボタンを押して音声メッセージの指示に従ってください。それでも問題が解決しない場合は、AEDコールセンターへご連絡下さい。

こちらが点滅することを毎日確認して下さい。
(2～3秒間隔で点滅します)

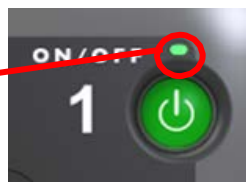

「スタンバイモード(正常時)」

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

* バッテリー装着セルフテスト (FRx+を使用した後や、指示があった場合に実行してください)

バッテリーをFRx+から外し、パッドコネクタが本体に装着されていることを確認してから、バッテリーを再装着します。自動的にセルフテストが開始します。音声メッセージに従って、セルフテストを完了して下さい。セルフテストが完了するとFRx+はスタンバイ状態になります。



①「セルフテストを開始します。緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい。」

②「ショックボタンのテスト。オレンジのボタンが点滅したらボタンを押して下さい。テストは完了しました。」

③「電源ON/OFFボタンのテスト。緑の電源ON/OFFボタンを押して下さい。テストは完了しました。」

④「テスト中です...テスト中です...使用できます。」