

PHILIPS


Healthcare

ハートスタートHS1シリーズ

点検手順書



使用準備完了ランプ

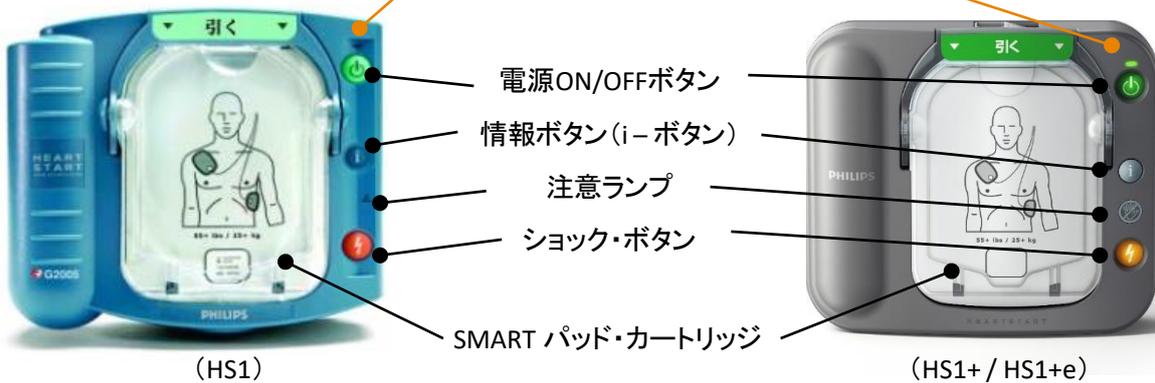

使用準備完了ランプを毎日チェック

HS1シリーズでは、毎日のセルフテストが自動実行されます。

- 使用準備完了ランプが点滅している場合: **いつでも使用できる**状態です。
- 使用準備完了ランプが点灯している場合: 使用中またはセルフテスト実行中です。
- 使用準備完了ランプが消えている場合
 - HS1シリーズ からビープ音が聞こえ、i-ボタンが点滅している: i-ボタンを押して音声ガイドに従ってください。
 - HS1シリーズ から3回のビープ音が連続して鳴る: 当社AEDコールセンターまでご連絡ください。
 - HS1シリーズ からビープ音が聞こえず、i-ボタンも点滅しない: バッテリーを装着／交換して、セルフテストを実行します。

使用準備完了ランプが点滅することを確認してください
(3秒間隔で点滅します)



AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

バッテリー装着セルフテスト ※パッド・カートリッジを装着した状態で行ってください

バッテリーをHS1シリーズ から取り外し、5秒経過してから再装着すると、バッテリー装着セルフテストが実行されます。このテストは非常に詳細なテストで、必要以上に実行するとバッテリーの寿命が短縮されます。

以下の場合のみ行ってください。

- AEDの初回使用時
- 傷病者の処置に使用した後
- バッテリー交換後
- AEDが破損した可能性のある場合



バッテリーを再装着後、音声ガイドに従ってください。指示があればボタンを押します。このテストは約1分かかります。1分待つと、「使用できます」のメッセージが聞こえます。

・ HS1シリーズとは、HS1 / HS1+ / HS1+e を指しています。

・ 出典: ハートスタート HS1 除細動器 取扱説明書、ハートスタート・クイック・セットアップ・ガイド

販売名: ハートスタート HS1
医療機器承認番号: 21700BZY00426000
特定保守管理医療機器 / 高度管理医療機器