
2. クリーニング

本製品およびライトタッチフェイスマスク(オプション)は1週間に1度以上の 洗浄を行うことを推奨いたします。洗浄および洗浄中には、次のことに注意 してください。

- 1. 本製品のバルブ部分に無理に力を加えたり、外したりしないでください。
- 2. 本製品は滅菌や熱湯消毒は行わないでください。
- 3. 取扱説明書に従って洗浄してください。

3. チャンバー・マスクのお手入れ方法

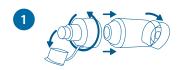


マウスピースキャップ、及びエンドキャップを引き抜き、マウスピースを回転させながら取り外します。



本製品は、液体中性洗剤を入れたぬるま湯の中で、1分間振り洗いした後、最低10分間浸け置きしてください。ライトタッチフェイスマスクは、液体中性洗剤を入れたぬるま湯の中で、2分間振り洗いするか、または10分間浸け置きしてください。



清潔な流水で部品をすすぎ、余分な水気を振り払い、すべての部品を完全に乾燥させてください。

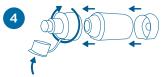

チャンバーを組み立て、清潔で乾燥した場所で 保管してください。

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号 フィリップスビル www.phillps.co.jc/healthcaste 開議・呼吸製品のお問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで ※営業所・出張所・駐在の連絡作は以下のURLで公開しています www.phillps.co.jc/SPC-Office



改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめこ了茶ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、 Koninklike Philips Nソまたはその他の会社の商標または登録商様です。

© 2019 Philips Japan, Ltd. 190401 R2-PDF



オプティチャンバー ダイアモンドの使い方

で使用の前に必ず『取扱説明書』をお読みください。

本体(スペーサー)



ライトタッチフェイスマスク (オプション)

サイズ: S, M, L 対象年齢(目安) S: 0~18 か月

M:1~5歳 I:5歳以上



お問合せ・ご相談は お客様コールセンター TEL:0120-48-4159 受付時間 7:00~22:00 (年中無休 365日対応)

一般的名称: 呼吸ガス混合器 販売名: オプティチャンバーダイアモンド 医療機器届出番号: 13B1X00221000095 一般医療機器

1. 吸入手順

- ※ スペーサーを触る前に必ず手を洗い清潔にしてください。
- ※ ご使用にあたっては、医師の指示に従いご使用ください。



ンバー内部に損傷、または異物がにしっかりと挿入してください。 ないことを確認してください。異物 があった場合は取り除いてください。



マウスピースキャップをはずし、チャ MDI*キャニスターをエンドキャップ



マウスピースを唇で密閉するように はじめてください。



吸入流速アラート音が鳴った場合、 くわえ、息を吐いてください。MDIを息を吸うスピードをおとしてください。 作動させ、すぐにゆっくりと息を吸い 最長8秒間、もしくは医療従事者の 指示に従って息を止めてください。



ライトタッチフェイスマスク(オプ ション)を使用する場合は、マスクを マウスピースに差し込み、軽くひねって振ってください。(薬剤によっては てしっかりと接続してください。



MDIが挿入されたチャンバーを、 使用するMDIの取扱説明書に従っ 振る必要がないものもございます。)



ライトタッチフェイスマスクをご使用 の際は、口と鼻を覆うようにマスク を顔にあてて密封させます。次に チャンバー内に1回噴霧し、5~6回 の呼吸の間、密着させてください。



呼気時に呼気弁が開くので、呼吸回 数のカウントに便利です。 呼気弁の紛失にご注意ください。

注意:使用中に呼気弁、または吸入流速アラートを手等によって塞がないでください。

* MDI: Metered Dose Inhaler (噴霧式定量吸入器)