



## ドリームマッパー インストールガイド

# ドリームマッパーは、 無料のモバイルア お持ちのスマート

\*ドリームマッパーは、フィリップス・レスピロニクス合同会社

## わかりやすい 治療の推移

お持ちのモバイル機器をタッチして、一目で最近一週間の治療状況を確認できます。またあらかじめ設定した目標への達成具合も確認することができます。



# 、患者さんの日々の アプリケーションです。 フォンやタブレット

と直接契約にある医療機関の患者さんのみご利用可能です。

## 親切的な リマインダ機能

次回の診察予定や、正しく治療を続けるために大切な治療機器やマスクのお手入れの時期などを事前にお知らせします。



# 睡眠治療をサポートする にダウンロードしてご利用できます。

## やさしくコーチング

治療に対する思いや続けることへの障害についてやさしく解説し、目標に向けてのサポートをします。



## 豊富な 情報ライブラリ

睡眠呼吸障害や、その合併症に関する基本的な情報や、治療器の取り扱い方法、さまざまな動画を必要に応じて参照いただけます。



### お客様コールセンター

お客様コールセンターでは、お電話にてドリームマッパーに関するご質問を承っております。お気軽にお問い合わせください。

**0120-48-4159** (よるはよいこきゅう)  
受付時間 7:00~22:00 (年中無休 365日対応)

#### 注意事項

- アプリダウンロードは無料です。アプリのダウンロード時もしくはアプリをご利用時の通信料はお客様のご負担になります。
- Apple StoreやGoogle Playから専用のアプリケーションをダウンロードする必要があります。
- 掲載内容は、2018年7月時点のものです。予告なく変更・中止される場合があります。
- 画面はイメージで実際とは異なる場合があります。
- 本アプリケーションはiOS:9.0以上、Android:5.0以上のバージョンが対象となります。
- 通信環境によっては各種機能をご利用いただけない場合があります。
- 「Android」「Google Play」は、Google Inc.の登録商標です。
- 「iPhone」「App Store」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本コンテンツは予告なく終了する場合があります。
- ドリームマッパーは、フィリップス・レスピロニクス合同会社と直接契約にある医療機関の患者さんのみご利用可能です。
- ドリームマッパーは、ドリームステーションと併用するための専用アプリケーションです。
- ドリームマッパーにおけるプライバシーポリシーは、各アプリケーションストアやドリームマッパーのヘルプから参照できます。またフィリップスのプライバシーに関する通知は、<http://www.philips.co.jpのプライバシーに関する通知からご確認ください。>

### フィリップス・レスピロニクス合同会社

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

- フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付で株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

記載されている製品名などの固有名称は、Philips, Respiration, またはその会社の商標または登録商標です。

© 2016 Philips Respiration GK PN 1127981/190120 R7-W

## 1 アプリのダウンロード

### 検索してインストール

モバイル端末からApp StoreまたはGoogle Playで「ドリームマッパー」を検索して、アプリをインストールしてください。



※ iPadでアプリが見つからない場合は、表示設定を「iPhoneのみ」にしてください。

### QRコードを読み込みインストール


モバイル端末からご利用のOSに対応したQRコードを読み込みインストールしてください。



インストールが終了したらドリームマッパーを開き、設定を行います。


## 2 エリアの設定

お住まいの国を選択してください。

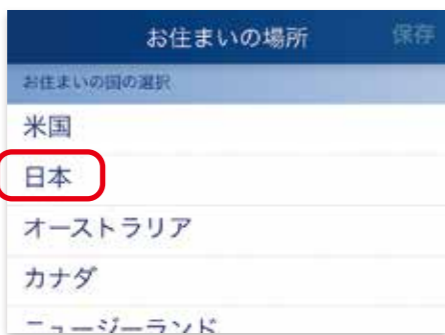

## 3 アカウント作成

初めてアプリを開く時は、「アカウントの新規作成」を選んでください。

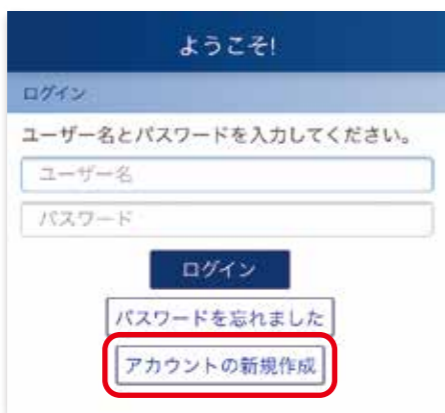

## 4 必要事項の入力


必要事項を入力してください。アカウントを作成するため、お使いの端末で使用可能なEメールアドレスをご用意ください。



- 機器底面に13桁のシリアル番号が記載されています。
- 日本では現在配信しておりません。

## 5 ライセンス契約書

契約書をご一読ください。ご同意いただけましたら□に切り替え、「受け入れる」ボタンをタップすると登録が完了します。

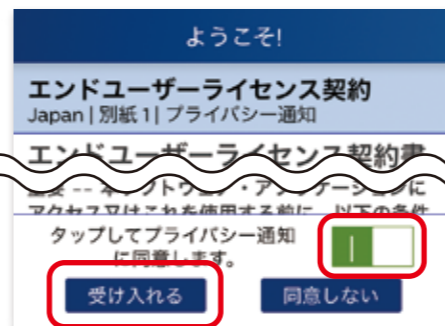

## 6 マスクの設定

マスクタイプを選択し、マスク一覧からお使いのマスクを選択します。



## 7 初日用ガイドビデオ

はじめにご覧いただきたい動画のリストが表示されます。




スキップしても後から視聴いただけます。

## 8 Bluetooth®の設定

この操作は、電源が入った状態のドリームステーションの近くでおこなってください。

アプリと機器を接続する場合は、Bluetooth®を使用するため「はい」を選択してください。

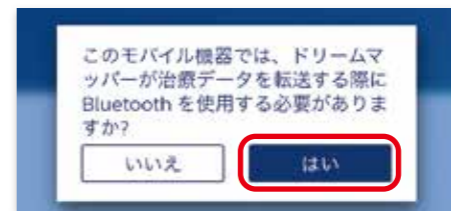

ドリームステーション側で、Bluetooth®設定をオンにする必要があります。ドリームステーションのメインメニュー→ユーザー設定→Bluetooth®画面で、回転矢印を表示させてください。

## 9 睡眠治療状況画面へ

睡眠治療の状況画面が表示されます。次回のログインからアプリを立ち上げるとこの画面が表示されます。



ご使用方法に関してはメニューボタンのヘルプを参照してください。