


**PHILIPS**

マスク

アマラ フルフェイスマスク (EE)  
アマラ SE フルフェイスマスク  
Amara full-face mask

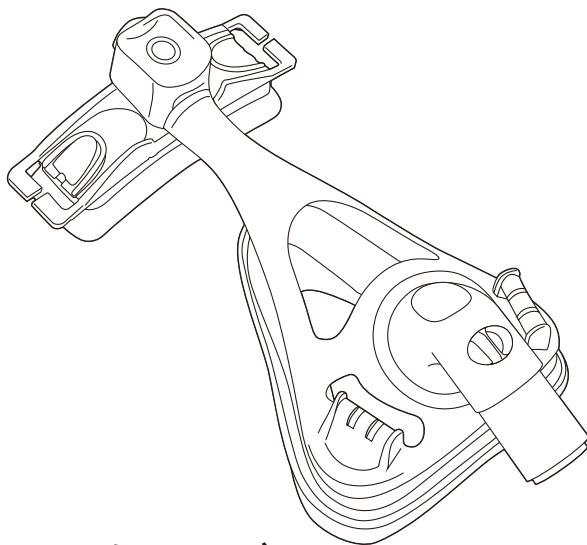

## マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン  
タブレットから

各端末から右記  
のQRコードを  
読み取り動画へ



シリコン



ジェル

パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

検索

弊社WEBトップページから右記  
のバナーをクリックして動画へ



## ヘッドギアとマスクの名称

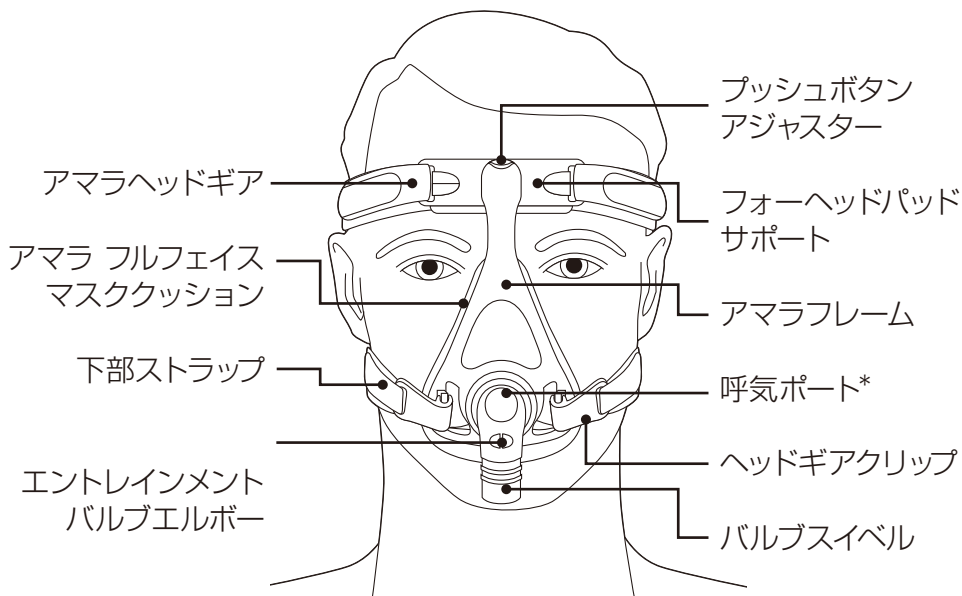

正しい装着図


\*呼気ポートは塞がないでください

## 1 マスク装着の手順 (1)

ヘッドギアクリップの片方をフレームからはずします。

ヘッドギアのストラップは最大までゆるめておきます。


プッシュボタンアジャスターを最大までのばしておきます。

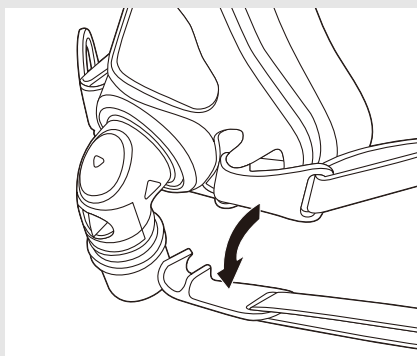


## マスク装着の手順 (2)

マスククッションを顔にあて、クッション部分をささえながらヘッドギアをかぶります。

ヘッドギアクリップの片方をもとの位置に取り付けます。


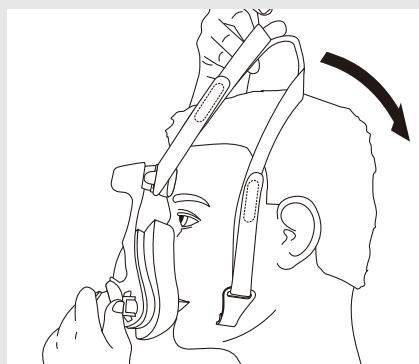


最初にヘッドギアの下部ストラップ、次に上部ストラップを左右均等に、締めすぎないように注意しながら調整します。プッシュボタンアジャスターを押し、フレームをスライドさせ、位置を調節します。

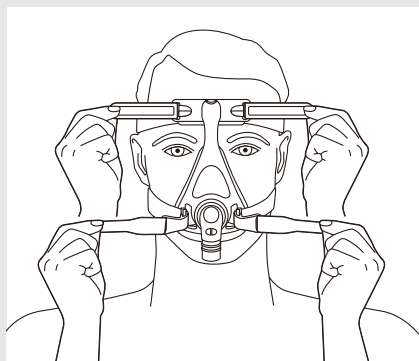



マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。

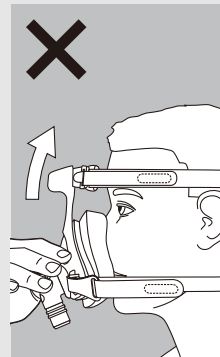
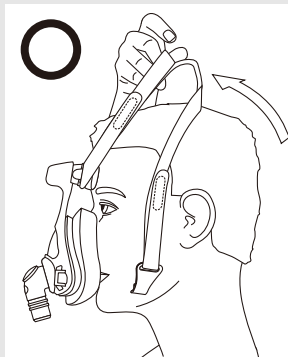


**マスクが頬に食い込んでいる場合**



ヘッドギアを締めすぎていませんか？  
特にヘッドギアの下部ストラップは  
頬との間に指が1本入る程度に緩めます。

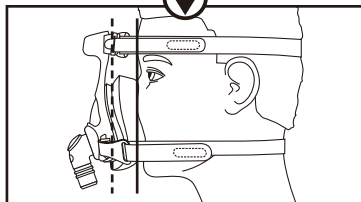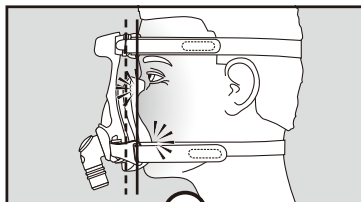**目の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？  
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで  
とめなおします。

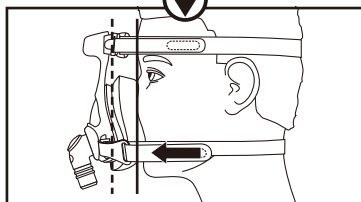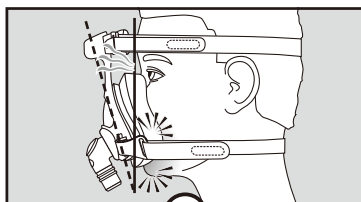**口元の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？  
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで  
とめなおします。

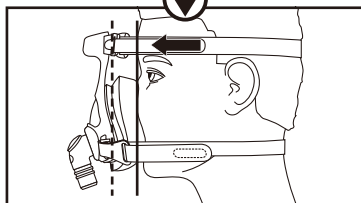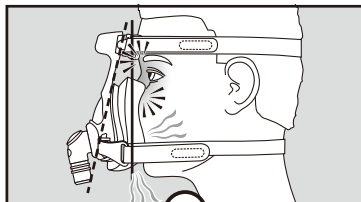





### 3 マスクの分解／組み立て

部品名	分解	組み立て
ヘッドギア	フォーヘッドパッドサポートとヘッドギアクリップから外します。	上部ストラップをフォーヘッドパッドサポートに通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通します。
フォーヘッドパッド	フォーヘッドパッドサポートのスリットからフォーヘッドパッドをスライドさせて取り外します。 	フォーヘッドパッドをフォーヘッドパッドサポートのスリットにスライドさせ取り付けます。 
マスクのクッション	マスクフレームから取り外します。 	親指でクッションをカチッと音がするまで押し込みます。 

## 4

## 付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

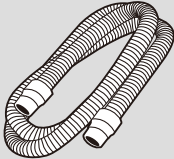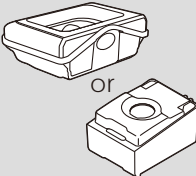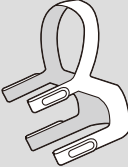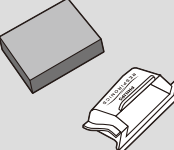頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 給水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

# フィルタの取り付け方法

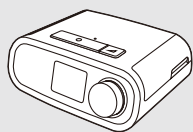

ドリーム  
ステーション

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

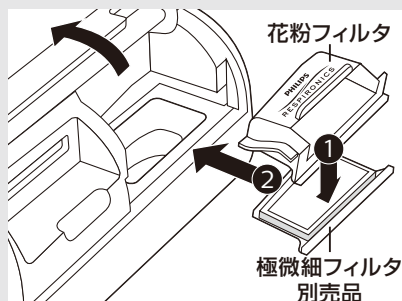

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています


スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを  
読み取り動画へアクセス





パソコンから

フィリップス・レスピロニクス    
弊社WEBトップページから右記の  
バナーをクリックしてアクセス

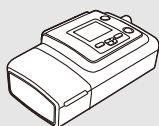


BiPAP A40システム  
シルバーシリーズ

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図の順でセットします。

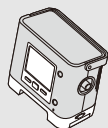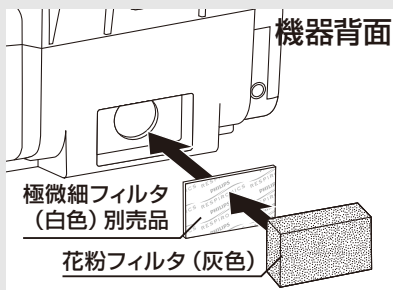

トリロジーplus  
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際  
は右図のようにセットします。

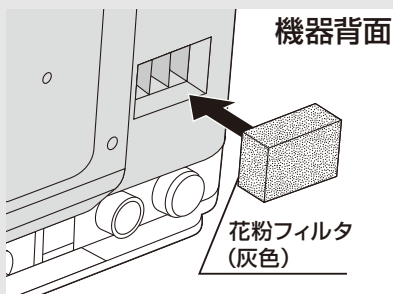



## CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこぎゅう

**0120-48-4159**

受付時間 9:00~17:30

※日・祝日・年末年始 休業

## 人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域営業所・出張所・駐在

受付時間 平日9:00~17:30

夜間休日

機器安全センター

**0120-633-811**

受付時間 平日17:30~翌9:00

土・日・祝祭日

販売名:アマラ フルフェイスマスク (E) 医療機器届出番号:11B1X00022000065 一般医療機器

販売名:アマラ SE フルフェイスマスク 医療機器届出番号:11B1X00022000066 一般医療機器

製造販売業者

**フィリップス・レスピロニクス合同会社**

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

© 2015 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN112828 160920 R3-S Printed in Japan