

# PHILIPS

## 通信モジュール

### セルラーモデム導入 簡易取扱説明書

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。  
必ず正式な取扱説明書をご覧ください。


取り付け方動画配信中

スマートフォン・タブレットなどの各端末からQRコードを読み取り動画へアクセスください。




## 1 各部の名称

前面

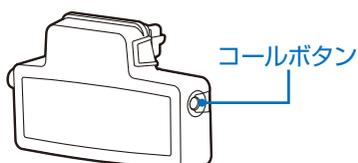


背面

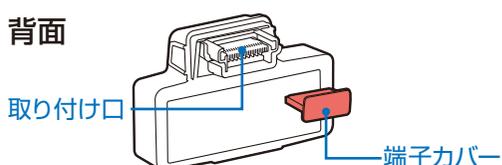

## 2 セルラーモデムの取り付け～接続


- 1 CPAP装置の電源を抜きます。  
CPAP装置背面のSDカードスロットカバーを取り外します。

※SDカードは取り外さないでください。

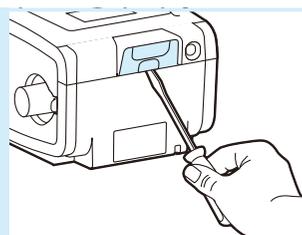


- 2 セルラーモデムの赤い端子カバーを取り外します。

※金属端子に触れないようご注意ください。

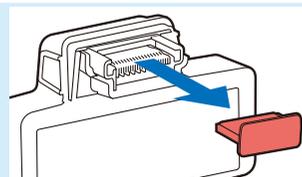


- 3 セルラーモデムを機器背面の差込口にしっかりと差し込んでください。

※取り外したCPAP装置背面のSDカードスロットカバー、端子カバーは機器返却時まで保管してください。

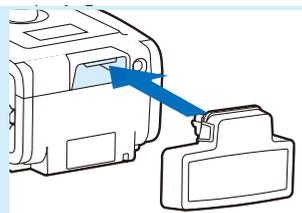

- 4 CPAP装置の電源を入れ、セルラーモデムの右側面にあるコールボタンを2秒間押し続けます。

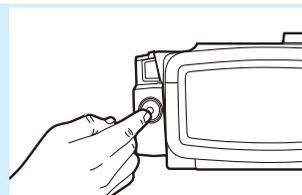

- 5 接続に成功するとCPAP装置の表示画面に右図のマークが表示されます。




## 治療データの転送

治療データは24時間おきに自動でクラウドサーバーへ転送されます。転送を行う時刻にCPAP装置の電源が抜けている場合、転送は行われませんが次に電源が入った際に自動で転送が行われます。

※治療終了後すぐに転送を行う場合は、**2** - **4**、**5**の手順を行います。

※コールボタンを2秒間押ししても表示画面にアイコンが表示されない場合は、30秒ほど時間を置いてから**2** - **4**、**5**の手順を行います。

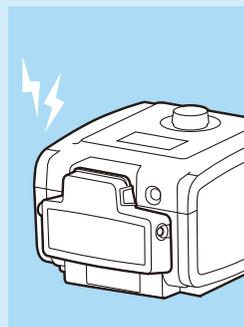

## 3 エラー表示アイコン

接続チェック時に以下のようなアイコンが表示されることがあります。その他のアイコンにつきましては取扱説明書をご覧ください。弊社担当営業までお問い合わせください。

表示	状態	対策
	無線信号なし/接続不可	携帯電話の電波が受信できないか、微弱な場所に設置されています。CPAP装置を別の場所に移動して、再度接続を確認してください。
	無線信号微弱	
	ネットワーク接続なし	CPAP装置への取り付けを確認してください。
	システムへの接続が許可されていない	弊社の登録作業が済んでいません。2~3日経っても表示が消えない場合は、弊社担当営業までご連絡ください。
	モデムは作動していません	再度コールボタンを押してください。通信を行う場合は、このアイコンが表示されなくなった後に、コールボタンを2秒間押し続けます。

フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

**0120-48-4159** (よるはよいこきゅう)

受付時間 9:00~17:30 ※日・祝日・年末年始休業

販売名: REMstar Auto System One 60シリーズ

販売名: REMstar Pro System One 60シリーズ

販売名: レムスターAuto PRIシステム

販売名: レムスター PRIシステム

医療機器承認番号: 22500BZX00268000

医療機器承認番号: 22500BZX00477000

医療機器承認番号: 22200BZX00874000

医療機器承認番号: 22200BZX00875000

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号

フィリップスビル マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/respironics/



© 2015 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。

あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」

までお問合せください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、

Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1121376 150610 R2-W