


PHILIPS

マスク

ドリームウェア ネーザルマスク DreamWear

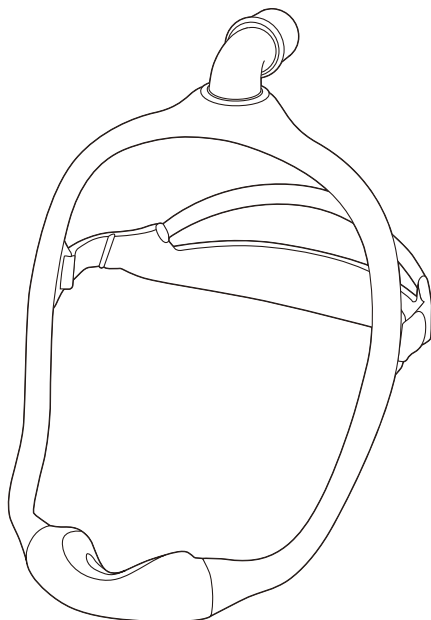

マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」➡
「マスク」へアクセス

ヘッドギアとマスクの名称

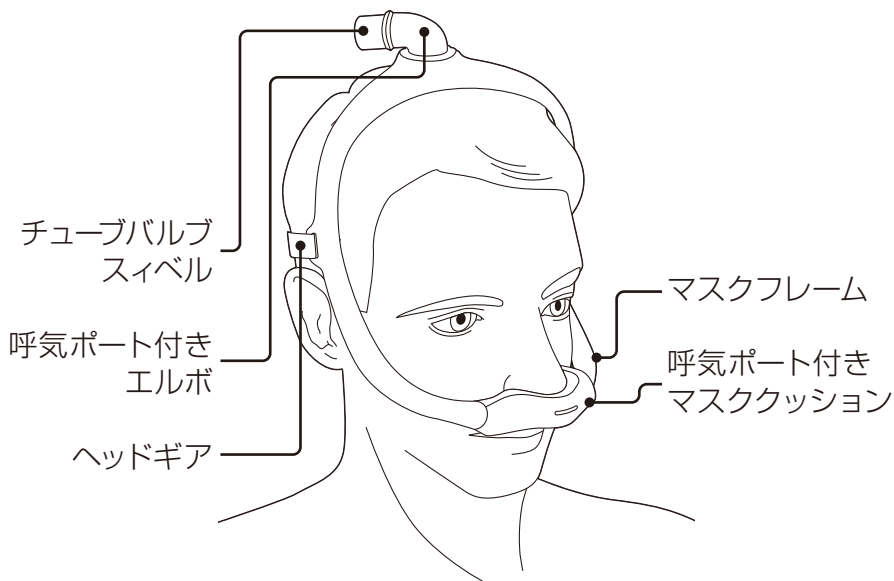


正しい装着図

*呼気ポート付きエルボおよび呼気ポート付きマスククッションは塞がないでください。


1 マスク装着の手順 (1)

クッションを鼻の下に当て
フレームを頭の上に
取り付けます。

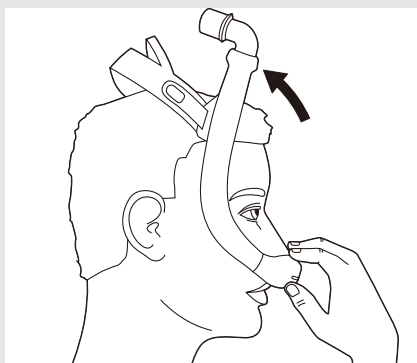

マスク装着の手順（2）


ヘッドギアを後頭部にかかるとおりに取り付けます。呼気ポート付きエルボが頭頂部に来ていることを確認してください。

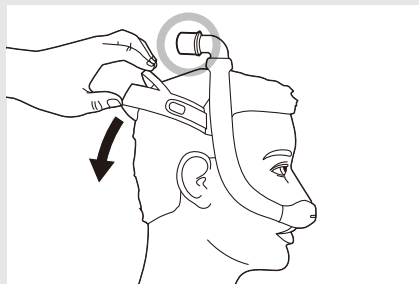


※ 鼻孔にあたる部分が鼻の上を覆わないように注意してください。



ヘッドギアのタブをはがし、締めすぎないように注意しながら長さを調整します。


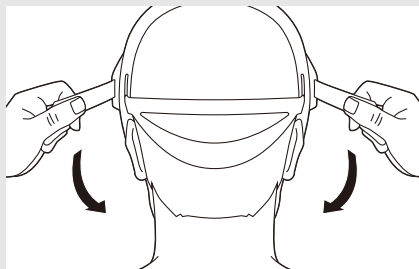


マスクを取り外す際は、クッション部分を手でつかんで浮かし、ヘッドギアを上方にずらしながら取り外します。


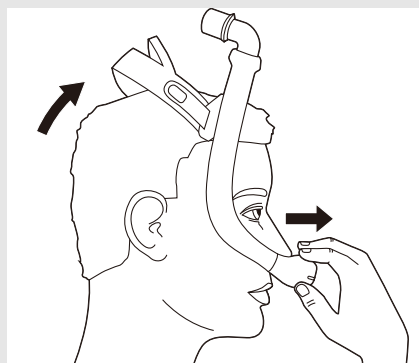


マスクが頬に食い込んでいる場合



ヘッドギアを締めすぎていませんか？
ヘッドギアと頬の間に指が1本入る
程度に緩めます。

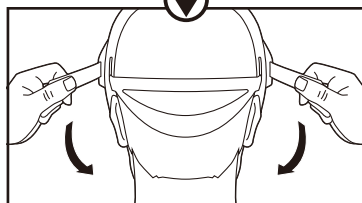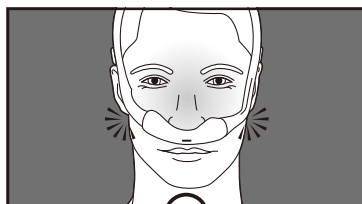**マスクフレームが耳にかぶる場合**







マスクフレームが後方に傾き、
耳にかぶる場合は、より小さいサイズ
のマスクフレームをおすすめします。

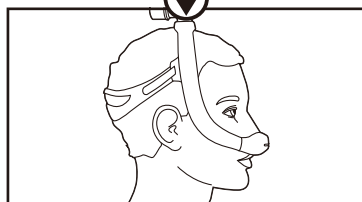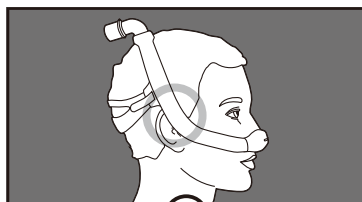**マスクフレームが目付近に近すぎる場合**

マスクフレームが頭の前方に傾き、
目に近すぎる場合は、より大きい
サイズのマスクフレームをおすすめ
します。

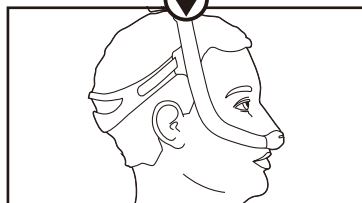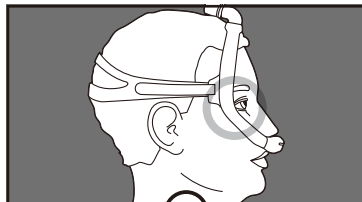




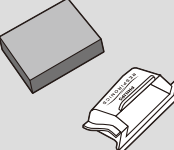
3 マスクの分解／組み立て

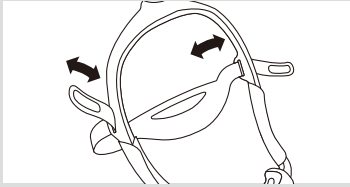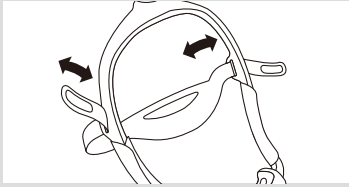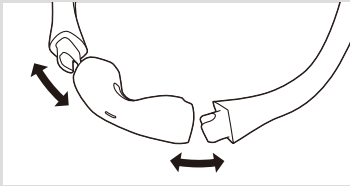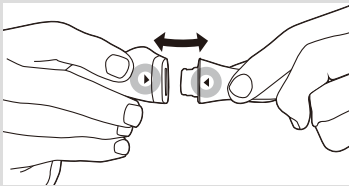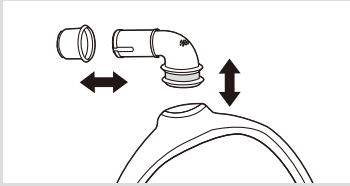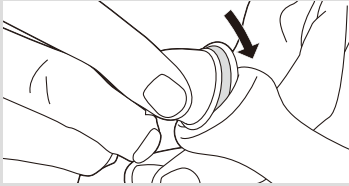部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	<p>ヘッドギアをマスクフレームから取り外します。</p> 	<p>ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。</p> 
クッション	<p>クッションをマスクフレームから取り外します。</p> 	<p>マスククッションとフレームの△マークを合わせ、カチッと音がするまで取り付けます。</p> 
呼気ポート付きエルボ	<p>マスクフレームから呼気ポート付きエルボを取り外します。</p> 	<p>マスクフレーム上部に、呼気ポート付きエルボをななめから溝に合わせ、差し込みます。</p> 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

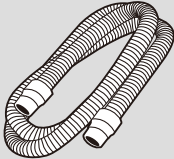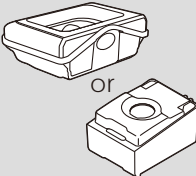頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当りの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

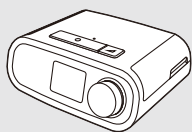

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

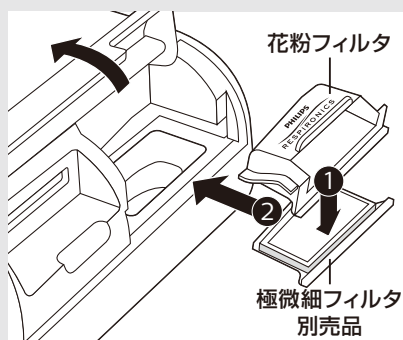

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→
「Dream Family」へアクセス

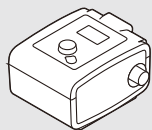

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

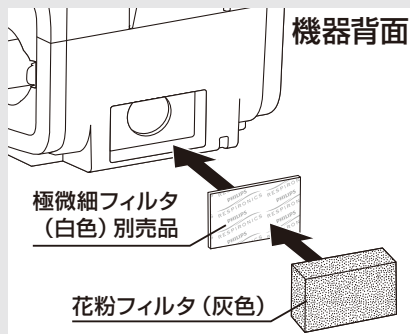

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→
「CPAP・睡眠検査装置」へアクセス



フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

販売名: ドリームウェア ネーザルマスク
医療機器届出番号: 11B1X00022000105
一般医療機器

- フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/PRJ-Office

© 2016 Philips Respironics GK
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。
PN 1127553/180620 R6-FK

