

PHILIPS

マスク

イーजीライフ ネーザルマスク
Easylife Mask



マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス 弊社WEBトップページから右記のパナーをクリックして動画へ

お使いの製品について
製品の解説動画や
マニュアルを
ご覧いただけます。
▶詳しくはこちら



ヘッドギアとマスクの名称

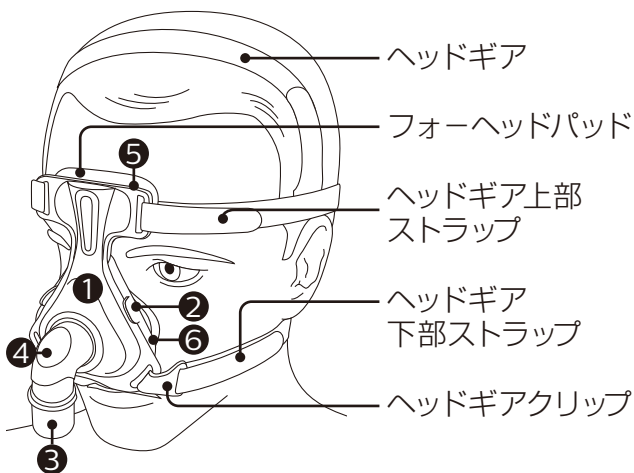


正しい装着図

- ①フェイスプレート／②取り付け用タブ
- ③スイベルエルボー／④呼気ポート*
- ⑤フォーヘッドパッドスロット／⑥サポートリング

*呼気ポートは塞がないでください。

顔側

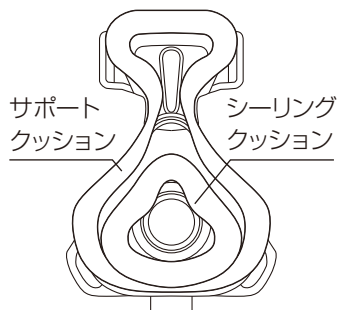


サポートクッションでマスクを安定させます。機器から空気が送られると自然にシーリングクッションが顔に密着します。マスクを快適に装着するため、締め過ぎにご注意ください。

1 マスク装着の手順 (1)


ヘッドギアクリップの片方をはずします。マスククッションを鼻にあて、クッション部分をささえながらヘッドギアをかぶります。

*マスクに直接ストラップを取り付け使用することもできます。

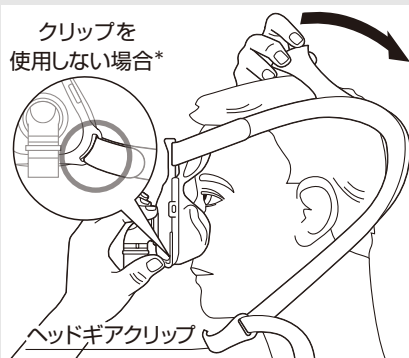


マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアクリップの片方を
もとの位置に取り付けます。


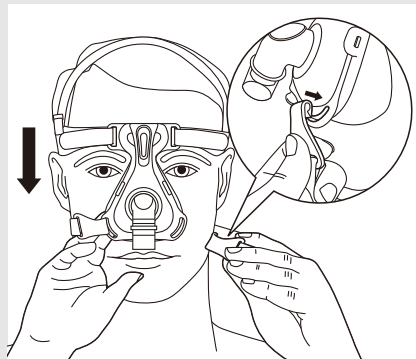


ヘッドギア上部ストラップと
下部ストラップを左右均等に、
締めすぎないように
注意しながら調整します。
ヘッドギアの頭頂部ストラップ
を調整してとめます。

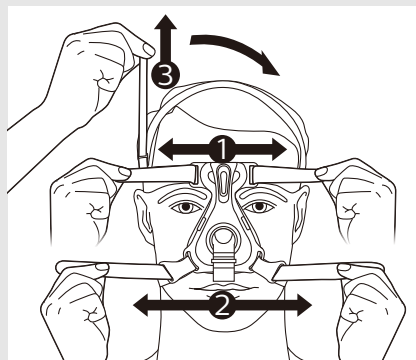



マスクを取り外す際は、
クッション部分を手で
押さえながらヘッドギア
を前方にずらして取り
外します。

※クッション部分をもち
あげながら取り外さない
でください。

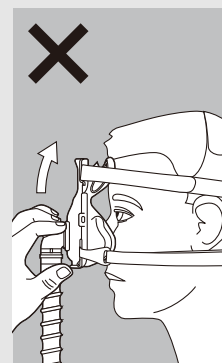
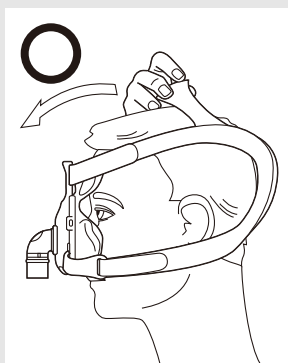


マスクが頬に食い込んでいる場合



ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部のヘッドギアは頬との間に
指が1本入る程度に緩めます。



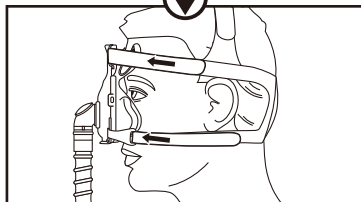
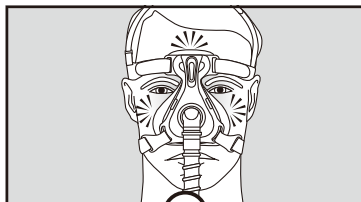

**目の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。

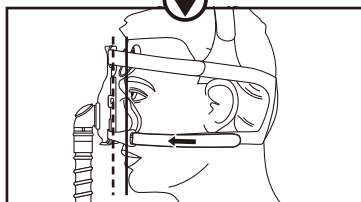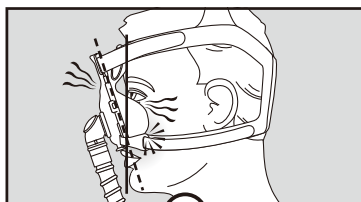**口元の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。



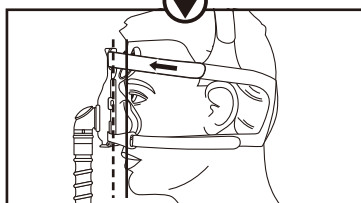
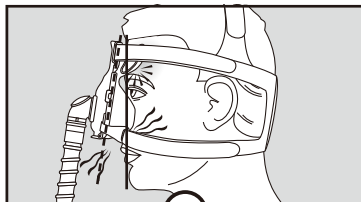


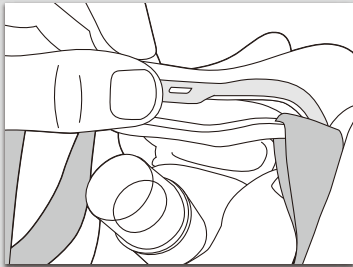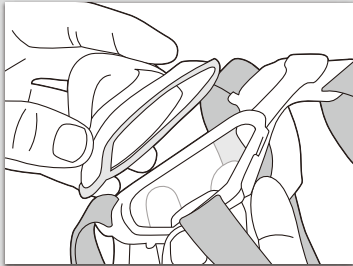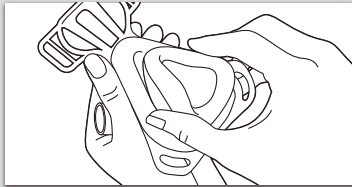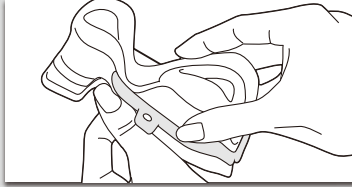部品名	分 解	組 み 立 て
ヘッドギア	<p>フォーヘッドパッドサポートとヘッドギアクリップから外します。</p>	<p>フェイスプレート上部の穴に上部ストラップを、下部の穴に下部ストラップを通して留めます。</p>
マスク クッション	<p>サポートクッションの3箇所の取り付け用タブを外側へ引いて外します。</p>  <p>サポートクッションを取り外してから、シーリングクッションを取り外します。</p> 	<p>マスクフレームのふちに合わせてシーリングクッションを取り付けます。</p>  <p>サポートクッションの3つのツメをフレームに合わせて取り付けます。</p>  <p>フォーヘッドパッドをフレームにしっかりと押し込みます。</p> 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

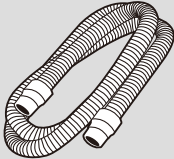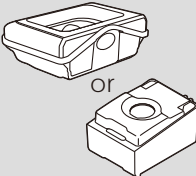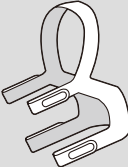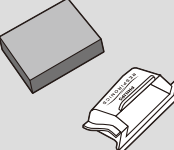頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 給水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当たりの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

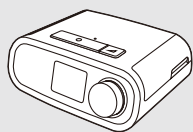

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

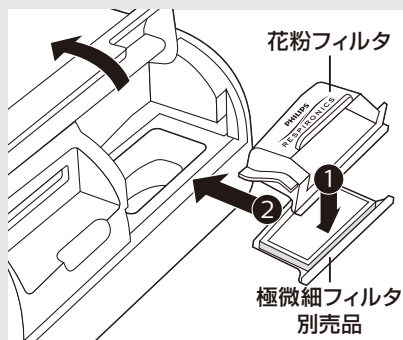

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス

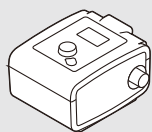

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

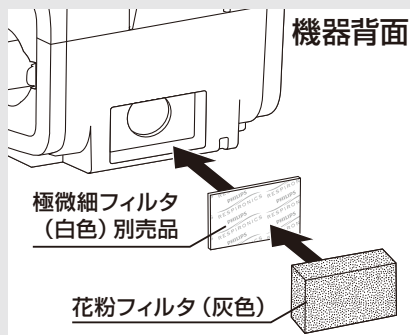

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス

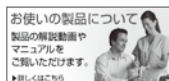



フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 9:00~17:30 ※日・祝日・年末年始休業

販売名: イージーライフ ネーザルマスク 医療機器届出番号: 11B1X00022000039 一般医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/healthcare

© 2015 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN1078639 160520 R8-S Printed in Japan