


PHILIPS

マスク

イージーライフ ネーザルマスク
Easylife Mask

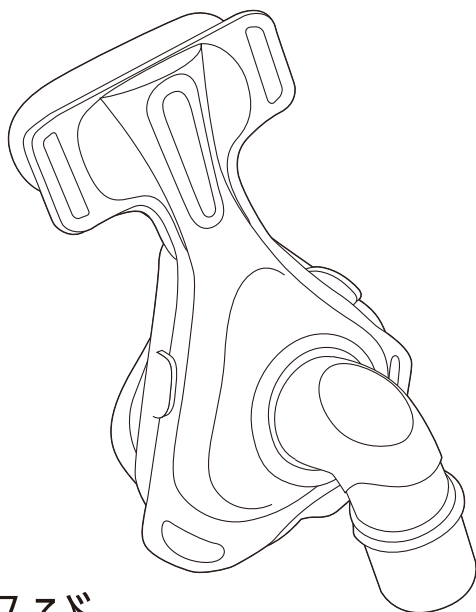

マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」➡
「マスク」へアクセス

ヘッドギアとマスクの名称

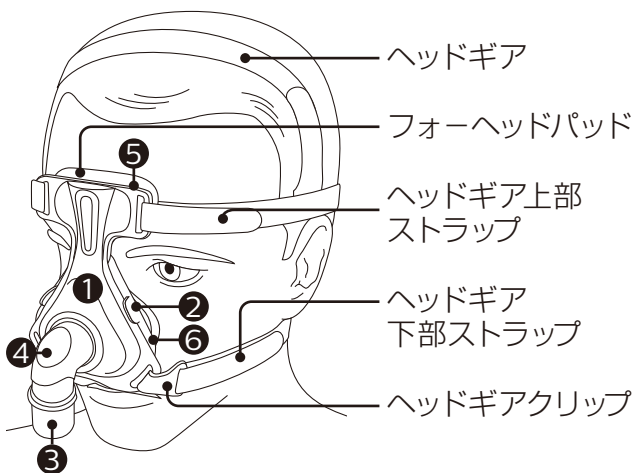


正しい装着図

- ①フェイスプレート／②取り付け用タブ
- ③スイベルエルボー／④呼気ポート*
- ⑤フォーヘッドパッドスロット／⑥サポートリング

*呼気ポートは塞がないでください。

顔側

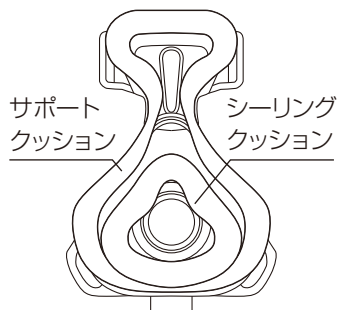


サポートクッションでマスクを安定させます。機器から空気が送られると自然にシーリングクッションが顔に密着します。マスクを快適に装着するため、締め過ぎにご注意ください。

1 マスク装着の手順 (1)


ヘッドギアクリップの片方をはずします。マスククッションを鼻にあて、クッション部分をささえながらヘッドギアをかぶります。

*マスクに直接ストラップを取り付け使用することもできます。

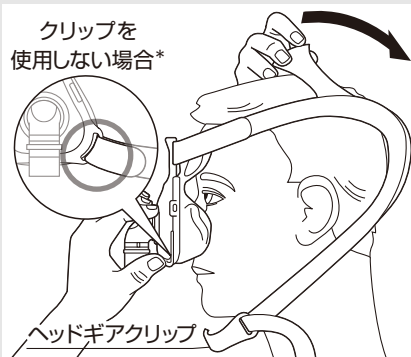


マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアクリップの片方を
もとの位置に取り付けます。


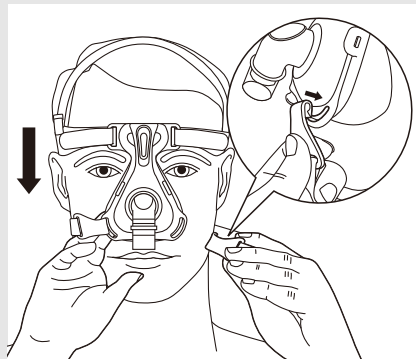


ヘッドギア上部ストラップと
下部ストラップを左右均等に、
締めすぎないように
注意しながら調整します。
ヘッドギアの頭頂部ストラップ
を調整してとめます。

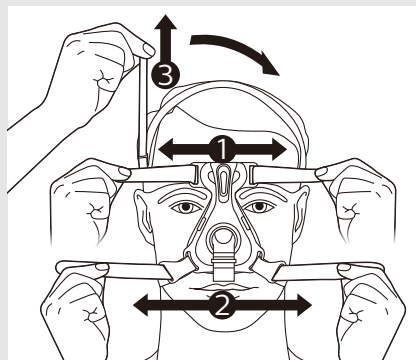



マスクを取り外す際は、
クッション部分を手で
押さえながらヘッドギア
を前方にずらして取り
外します。

※クッション部分を持ち
あげながら取り外さない
でください。

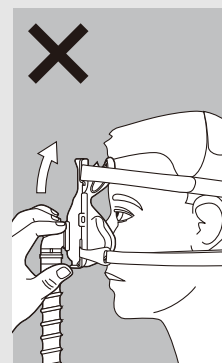
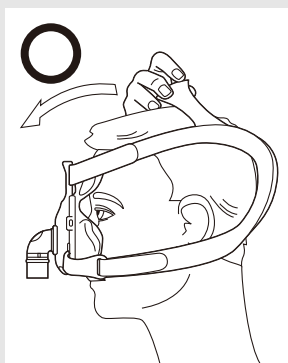


マスクが頬に食い込んでいる場合



ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部のヘッドギアは頬との間に
指が1本入る程度に緩めます。



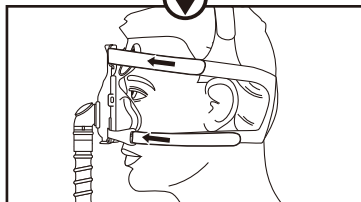
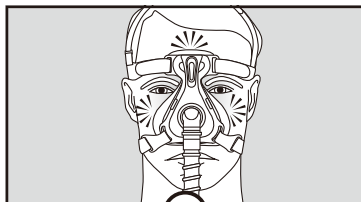

**目の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。

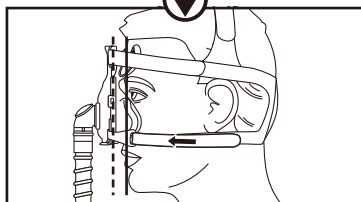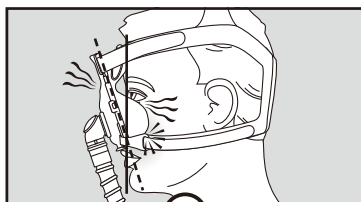**口元の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところで
とめなおします。


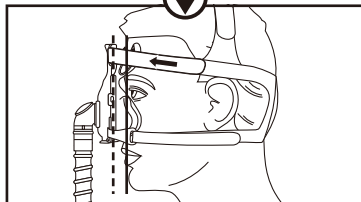
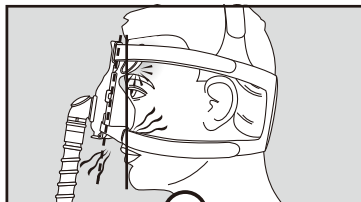


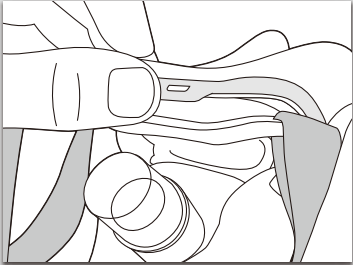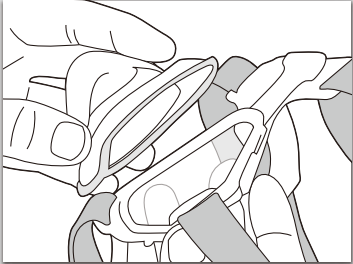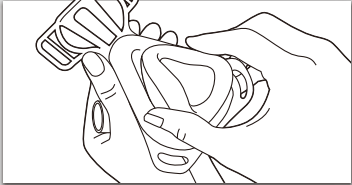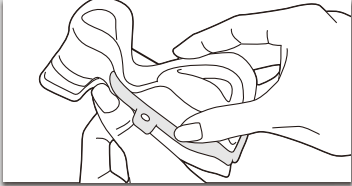
部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	<p>フォーヘッドパッドサポートとヘッドギアクリップから外します。</p>	<p>フェイスプレート上部の穴に上部ストラップを、下部の穴に下部ストラップを通して留めます。</p>
マスク クッション	<p>サポートクッションの3箇所の取り付け用タブを外側へ引いて外します。</p>  <p>サポートクッションを取り外してから、シーリングクッションを取り外します。</p> 	<p>マスクフレームのふちに合わせてシーリングクッションを取り付けます。</p>  <p>サポートクッションの3つのツメをフレームに合わせて取り付けます。</p>  <p>フォーヘッドパッドをフレームにしっかりと押し込みます。</p> 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

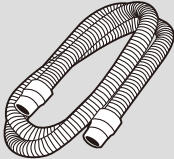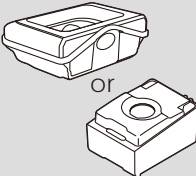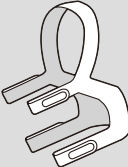頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗います。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当たりの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

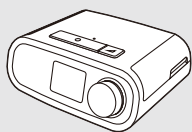

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

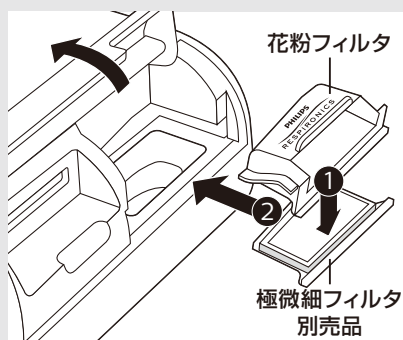

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→
「Dream Family」へアクセス

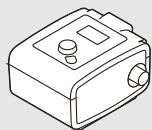

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

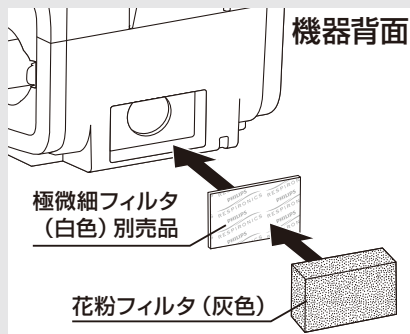

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→
「CPAP・睡眠検査装置」へアクセス



フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

販売名: イージーライフ ネーザルマスク
医療機器届出番号: 11B1X00022000039
一般医療機器

- フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/PRJ-Office

© 2015 Philips Respironics GK
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。
PN 1078639/190220 R14-FK

