


PHILIPS

マスク

ニュアンス プロ ジェルピローマスク
Nuance Pro Mask

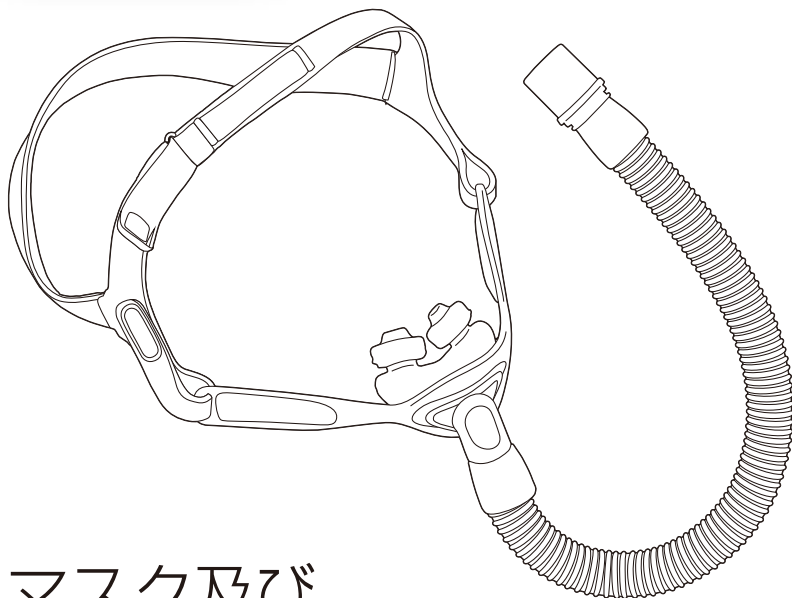

マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問合せください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス 弊社WEBトップページから右記のパナーをクリックして動画へ

お使いの製品について製品の解説動画やマニュアルをご覧いただけます。
▶詳しくはこちら

ヘッドギアとマスクの名称

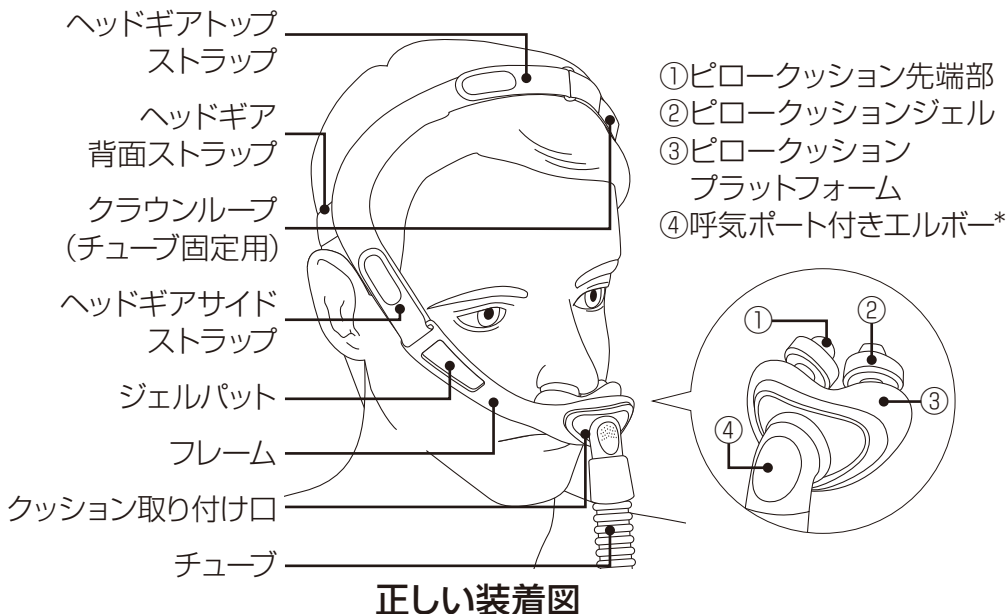


*呼気ポートは塞がないでください

1 マスク装着の手順 (1)


ピロークッション先端部を鼻孔にあてクッション部分をささえながらヘッドギアをかぶります。

後頭部のヘッドギア背面ストラップはねじれず平らになるよう調整します。

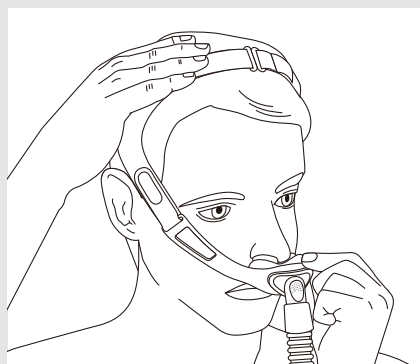


マスク装着の手順 (2)

頭頂部のヘッドギアトップストラップを調整して留めます。

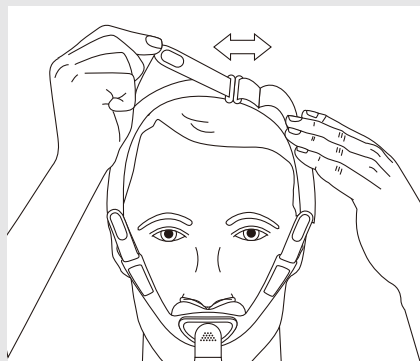


サイドストラップを左右均等になるよう上の方に引いて留めます。強く締めすぎないように調整します。

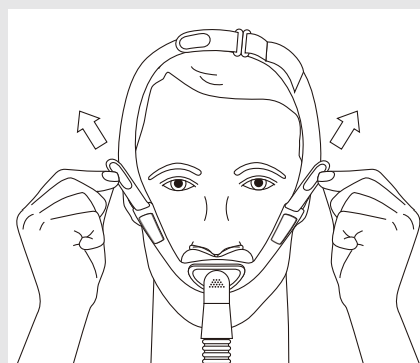



マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギア背面ストラップを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。

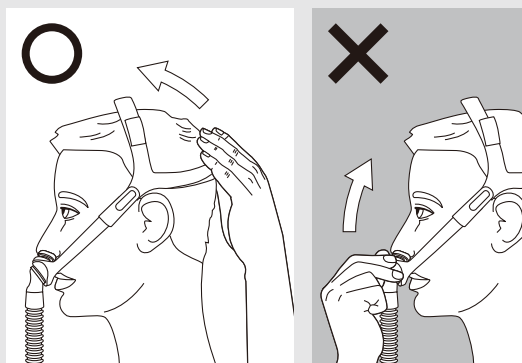



鼻孔が圧迫されている場合

ピロークッションを鼻孔に押し込まないでください。軽く鼻孔にあてる程度に調整します。

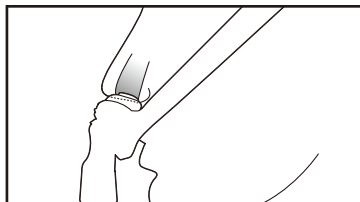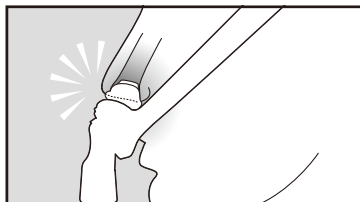


鼻が圧迫されている場合

クッションが適切にあたる位置にサイドストラップを調整します。

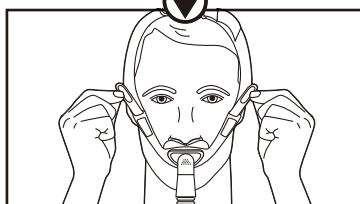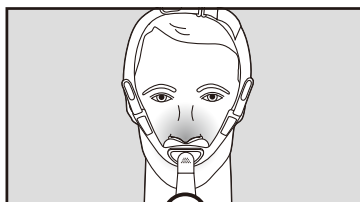


ヘッドギアの調整

ヘッドギア背面ストラップは後頭部でねじれないように注意します。

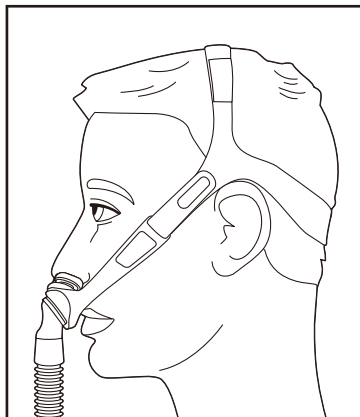


マスクの分解

クッション

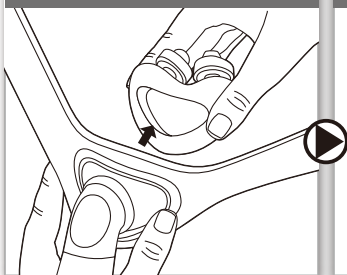


ピロークッション全体を持って、エルボーから外します。

エルボー

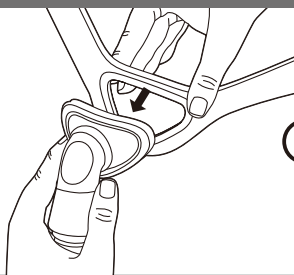

エルボー全体を持ち、フレームから取り外します。


フレーム

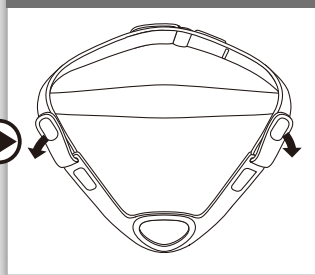

ヘッドギアサイドストラップを外しフレームから取り外します


マスクの組み立て

エルボー

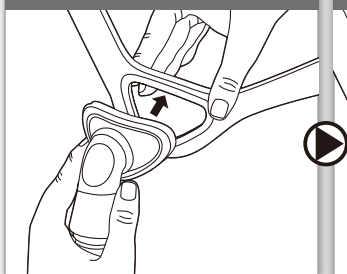


フレームとエルボーに段差ができないようにエルボーをクッション取り付け口に押し込みます。

クッション

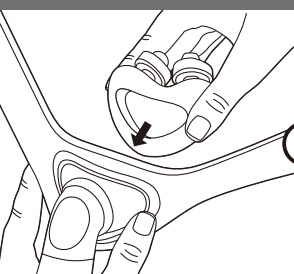





エルボーの背面に隙間ができないようにぴったりと組み合わせます。

フレーム

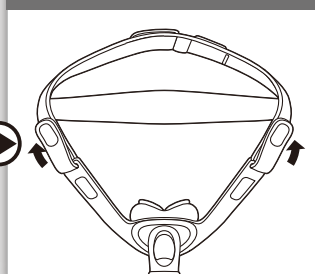

上図のように配置しヘッドギアサイドストラップをフレームに通して取り付けます。

4 付属品のお手入れ方法

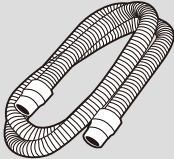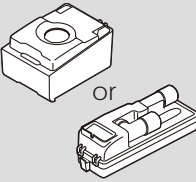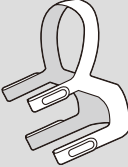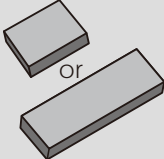頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 給水タンク	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
1週間	 ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。
2週間	 花粉フィルタ(灰色)	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。



- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

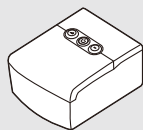


Mシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

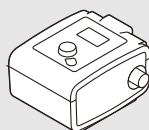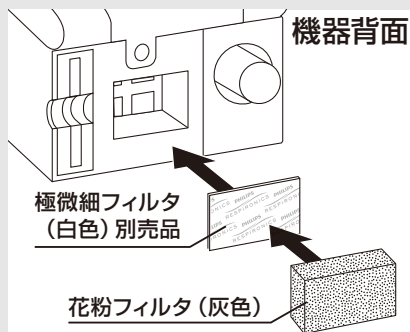

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

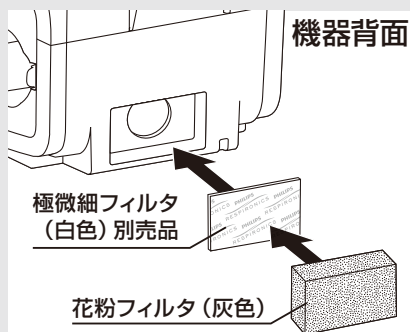

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスビロニクス [検索](#)
弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス





フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 9:00~17:30 ※日・祝日・年末年始休業

販売名: ニュアンス ジェルピローマスク 医療機器届出番号: 11B1X00022000061 一般医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/healthcare

© 2015 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問合せください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその会社の商標または登録商標です。

PN 1117613 150401 R3-S