


※本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

## 1 各部品の名称と設置イメージ

※下記の内容物が全てそろっていることを確認します。

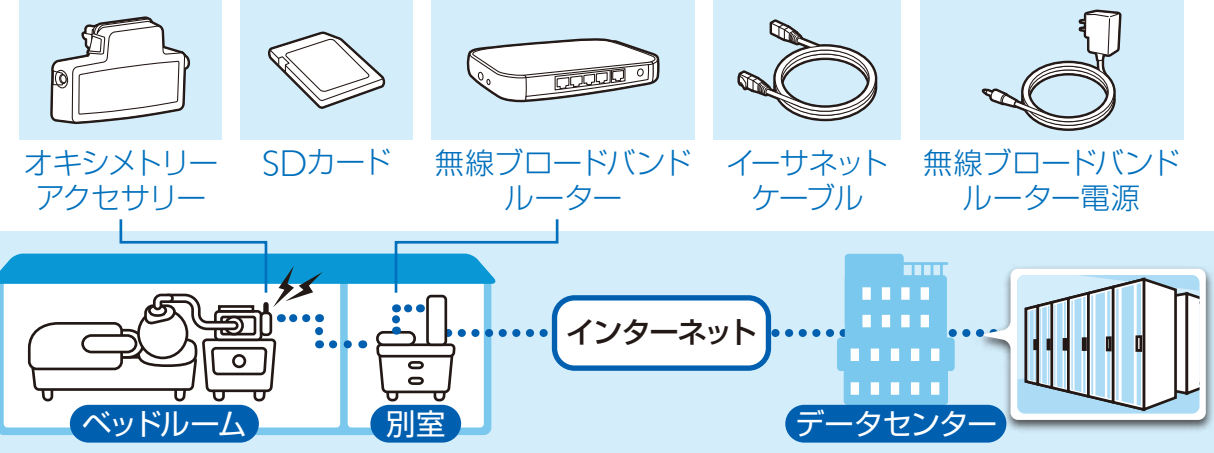

フィリップス・レスピロニクス合同会社  
CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう  
**0120-48-4159**  
受付時間 7:00~22:00 (年中無休365日対応)

販売名: レムスターAuto PRIシステム  
販売名: REMstar Pro System One 60シリーズ  
販売名: REMstar Auto System One 60シリーズ  
販売名: BiPAP Auto System One 60シリーズ

医療機器承認番号: 22200BZX00874000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
医療機器承認番号: 22500BZX00477000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
医療機器承認番号: 22500BZX00268000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器  
医療機器承認番号: 22500BZX00448000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

● フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付で株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**  
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
www.philips.co.jp/healthcare  
お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで  
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています  
www.philips.co.jp/PRJ-Office




© 2014 Philips Respironics GK  
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。  
あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所まで  
お問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、  
Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。  
PN 1116217/190220 R2-PDF

## 2 オキシメトリーアクセサリーの取り付け

1


CPAP装置の電源を抜きます。  
CPAP装置背面のSDカードカバーを取り外します。  
※SDカードは取り外さないでください。

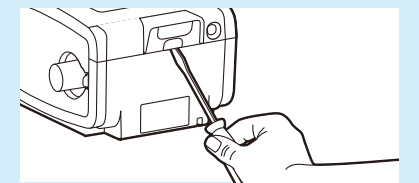

2


オキシメトリーアクセサリーの  
赤い端子カバーを取り外します。

※金属部に触れないようご注意ください。

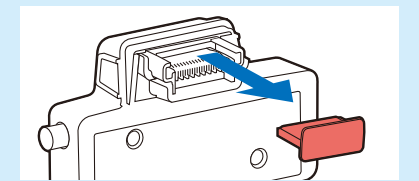

3

オキシメトリーアクセサリーを機器背面の  
差込口にしっかりと差し込んでください。  
※取り外したCPAP装置背面のSDカードカバー、端子  
カバーは機器返却時まで保管してください。

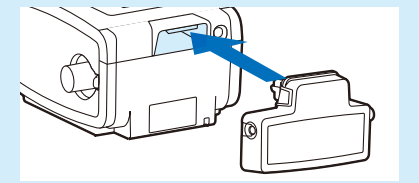


### 3 無線ブロードバンドルーターの設置～利用開始


1 ご自宅のネットワーク設備と無線ブロードバンドルーターを接続します。  
ご自宅のインターネット接続設備と無線ブロードバンドルーターを接続する際は、イーサネットケーブルを使用します。

接続例 — 有線 — ●●● 無線LAN


ご自身でインターネット接続設備をお持ちの戸建住宅など

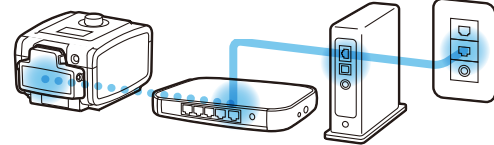


建物共用部にインターネット接続設備が設置された集合住宅など

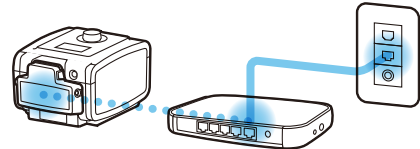

2 アクセスポイントの電源コードを接続し、電源を入れます。約30秒後、ランプが右図のように点灯します。

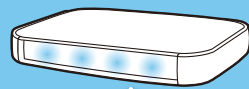

3 CPAP装置の電源を入れて、オキシメトリーアクセサリーの左側面にあるコールボタンを2秒間押し続けます。

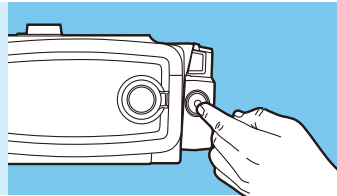


4 接続が成功していればCPAP装置の表示画面に右図のマークが表示されます。



#### 治療が終了したら

CPAP装置の停止ボタンを押してから1時間後に治療データがEncoreAnywhereへ転送されます。


※治療終了後すぐにCPAP装置の電源コードを外すと通信が行われません。すぐに通信を行う場合は治療後に3-3、4の手順を行います。チェックマークが表示されれば電源コードを外しても問題ありません。

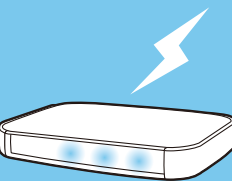

### 4 よくある質問


Q1. 使用しない時は、無線ブロードバンドルーターの電源を抜いてもいいですか？

通常は治療終了後も、電源は抜かないでください。  
※停電・移設等の場合に限り、電源を抜いてください。再度電源を入れた後は、左ページ3の接続チェック項目を参照し、正しく接続できることをご確認ください。

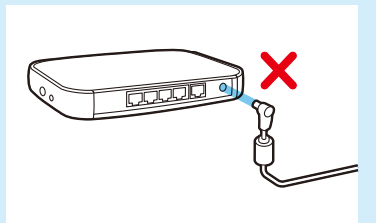

Q2. 市販の無線LANルーターとオキシメトリーアクセサリーを直接通信することは可能ですか？

お手元のオキシメトリーアクセサリーは、無線ブロードバンドルーターだけに接続を行うように設定されています。市販品と直接通信することはできませんので、ご自宅に無線LANルーターをお持ちの方も無線ブロードバンドルーターを別途ご使用ください。

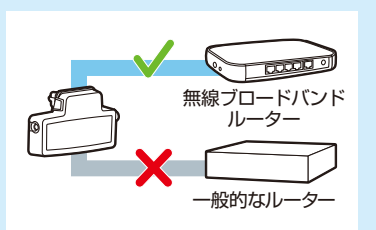

Q3. 接続チェックでエラーアイコンが表示されるのですが…？

接続チェック時に以下のようなアイコンが表示されることがあります。その他のアイコンにつきましては取扱説明書をご覧ください。弊社担当営業までお問い合わせください。

表示	状態	対策
	無線ネットワーク信号なし 接続不可	CPAPと無線ブロードバンドルーターを近づけてください。
	ネットワーク接続なし	取付を確認してください。CPAP装置を無線ブロードバンドルーターに近づけてください。
	システムへの 接続が許可されていない	弊社の登録作業が済んでいません。2~3日経っても表示が消えない場合は、弊社担当営業までご連絡ください。