


PHILIPS

マスク

トゥルーブルー ネーザルマスク
TrueBlue Mask

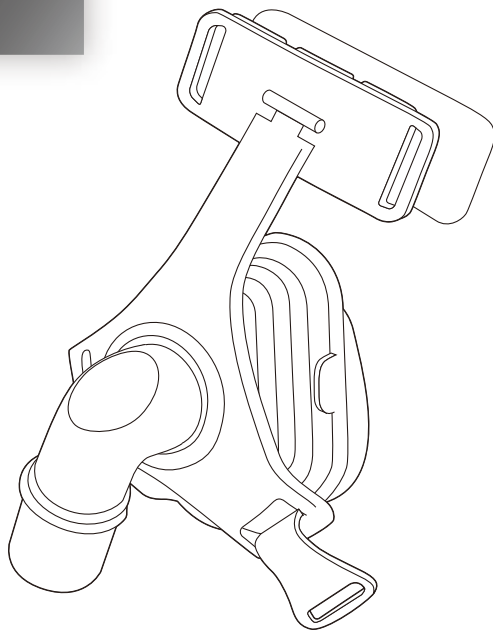

マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客様コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へ




パソコンから

フィリップス・レスピロニクス 弊社WEBトップページから右記
のパナーをクリックして動画へ

お使いの製品について
製品の解説動画や
マニュアルを
ご覧いただけます。
▶詳しくはこちら



ヘッドギアとマスクの名称

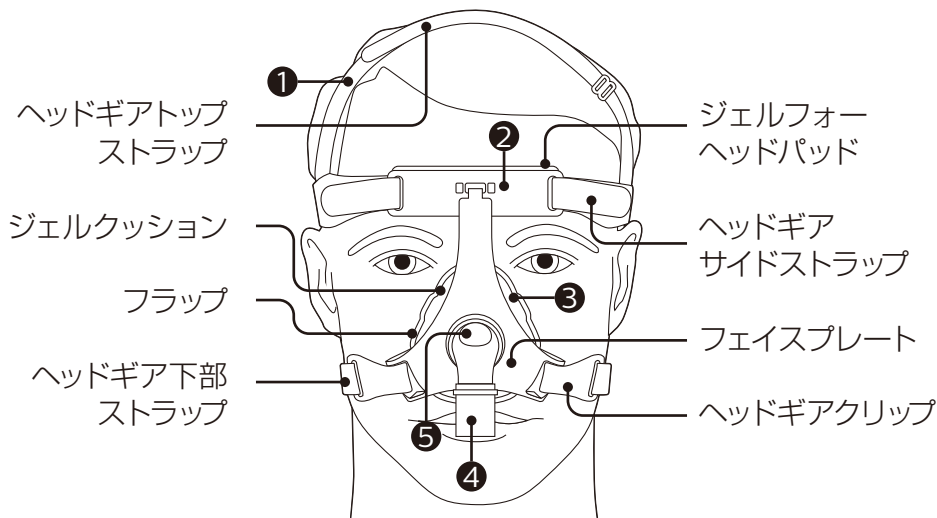

正しい装着図

- ①ヘッドギアトップタブ／②サポートブラケット
③バネ／④スライダー／⑤呼気ポート付エルボー*


*呼気ポートは塞がないでください。

1 マスク装着の手順 (1)

ヘッドギアクリップの片方をはずします。
マスククッションを鼻にあて、クッション部分をささえながらヘッドギアをかぶります。

*マスクに直接ヘッドギアストラップを取り付けることもできます。


ヘッドギアクリップを使用しない場合*

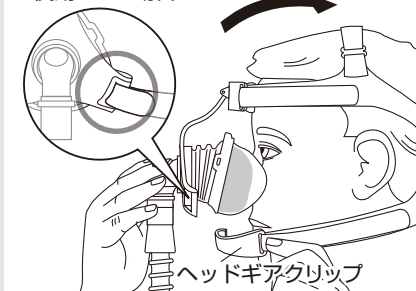

1


マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアクリップの片方をもとの位置に取り付けます。

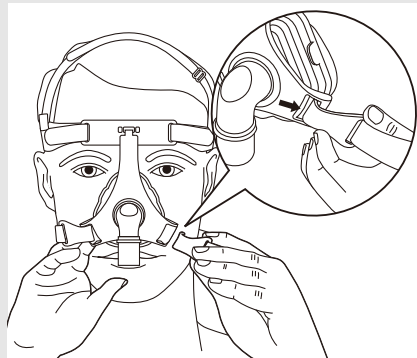



ヘッドギア上部のストラップとヘッドギア下部のストラップを均等に引きジェルフォーヘッドパッドが額に快適に収まるよう調整します。

必要に応じてヘッドギアのトップストラップ調整します。

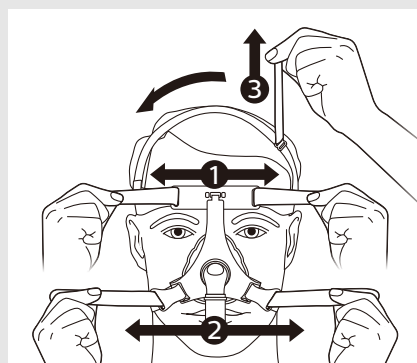



マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。

※クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。

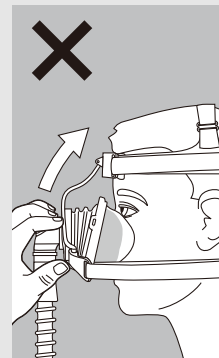
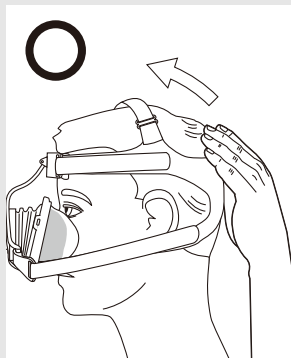


マスクが頬に食い込んでいる場合



ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部のヘッドギアは頬との間に
指が1本入る程度に緩めます。


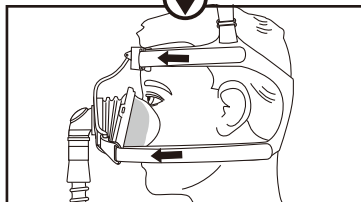
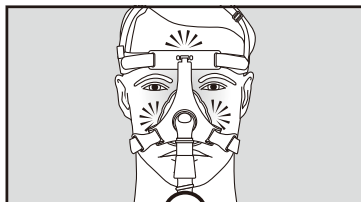
**目の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところ
でとめなおします。

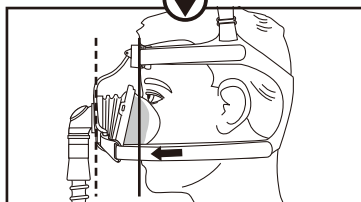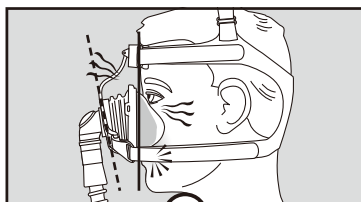**口元の周辺に空気漏れがある場合**

マスクが顔と平行になっていませんか？
ヘッドギアを顔が圧迫しないところ
でとめなおします。



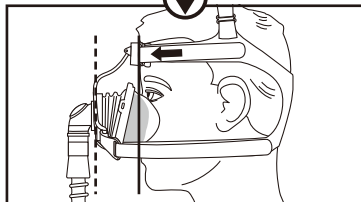
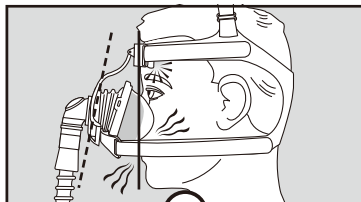


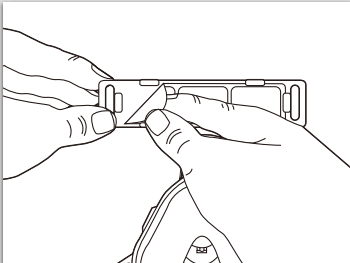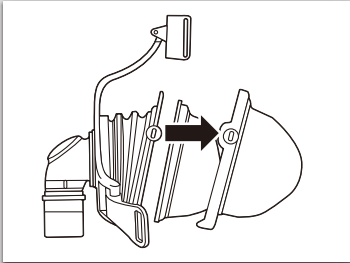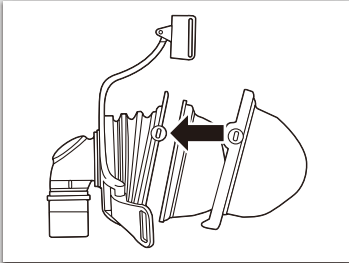部品名	分解	組み立て・取り付け
ヘッドギア	<p>フォーヘッドパッドサポートとヘッドギアクリップから外します。</p>	<p>上部ストラップをフォーヘッドパッドサポートに通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通します。</p>
フォーヘッドパッド	<p>ジェルフォーヘッドパッドをつかみ、サポートブラケットからはがします。</p> 	<p>ジェルフォーヘッドパッドを所定の位置に押し込みます。ジェルフォーヘッドパッドが、フォーヘッドブラケットの上下左右のツメに合わせてはめこまれていることを確認してください。</p>
マスククッション	<p>クッションとフレーム接合部の取り付け用タブを外して分解します。</p> 	<p>取り付け用タブの位置を合わせカチッと音が出るまで押し込みます。</p> 

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

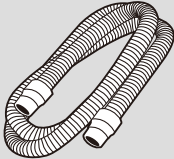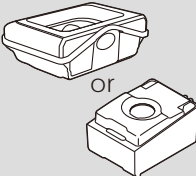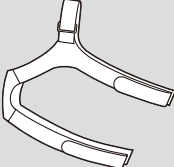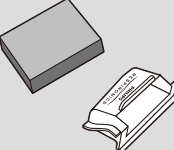頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 給水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、五分間おきます。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

フィルタの取り付け方法

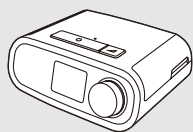

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

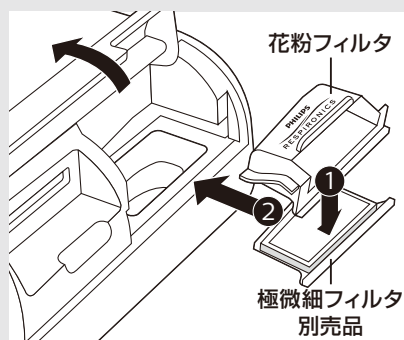

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから


フィリップス・レスピロニクス

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス

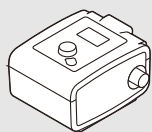

System One
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

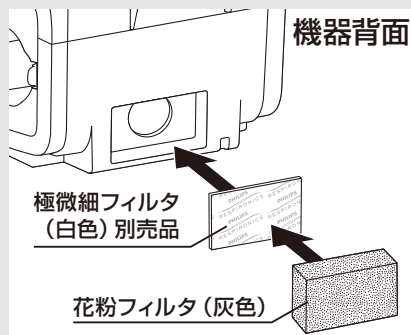

System Oneシリーズの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスピロニクス

弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス

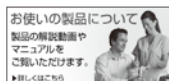



フィリップス・レスピロニクス合同会社

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 9:00~17:30 ※日・祝日・年末年始休業

販売名: トゥルーブルー ネーザルマスク 医療機器届出番号: 11B1X00022000053 一般医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/healthcare

© 2015 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1096119 160520 R4-S