

PHILIPS

マスク



ウィスプ小児用ネーザルマスク
ウィスプ小児用ネーザルマスク用SE エルボ
Wisp Pediatric nasal mask



マスク及び付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「7.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながらおこなってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、裏表紙のお問合せ先までご連絡ください。

ヘッドギアとマスクの各部名称

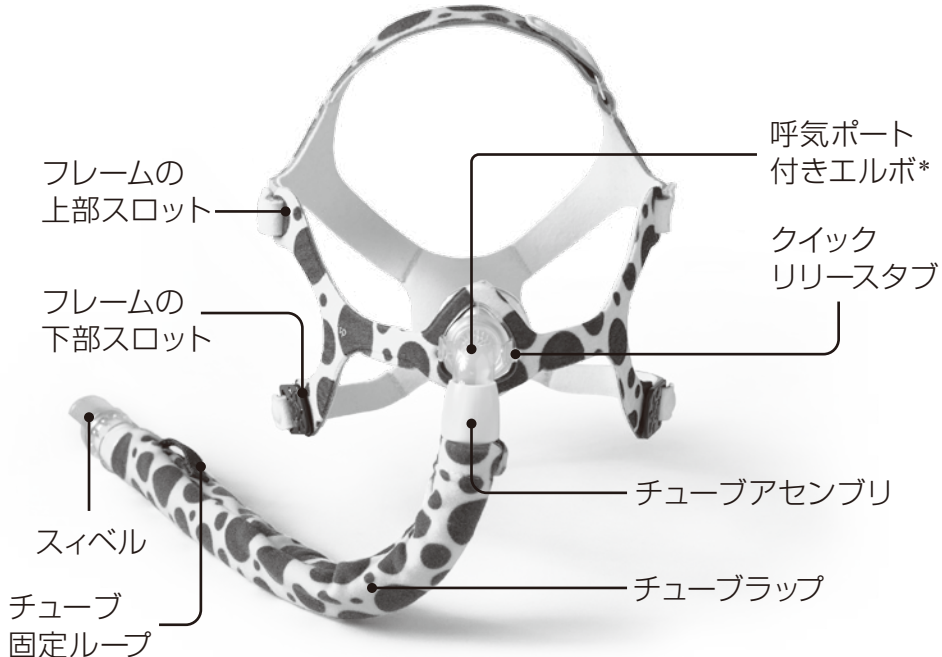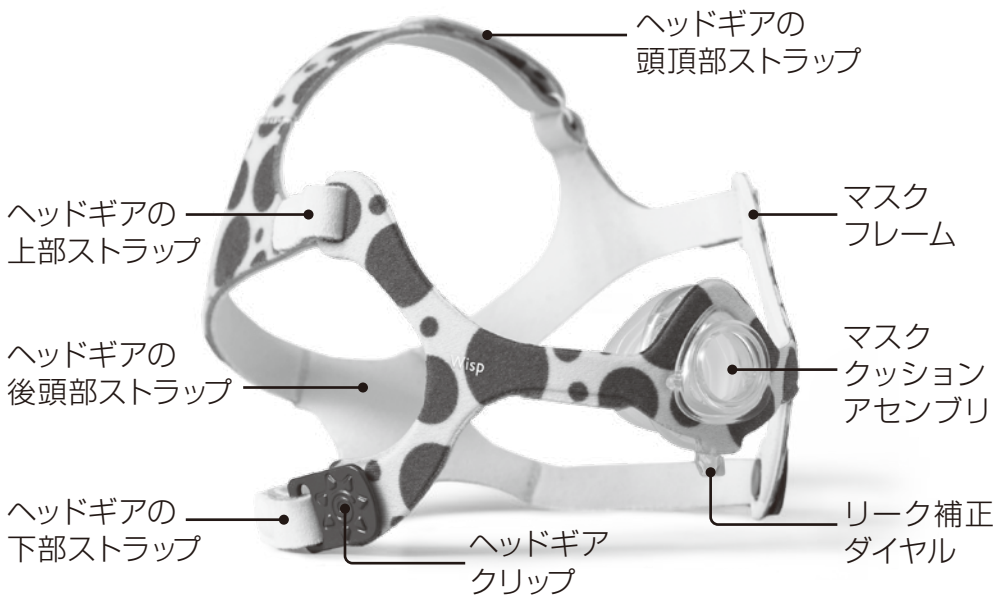

*呼吸ポート付きエルボは塞がないでください。

マスク装着の手順（1）

ヘッドギアのクリップを片方はずします。



リーク補正ダイヤルを下向きにしてクッションを鼻にあてたまま、ヘッドギアを装着します。



ヘッドギアの下部にクリップを再装着します。



マスク装着の手順（2）

上部ストラップと下部ストラップを左右均等に取り付けます。締めすぎないようにご注意ください。



ヘッドギアとマスクフレームが耳に触れないように頭頂部のストラップを調整します。



マスクを取り外す際は…

チューブアセンブリを取り外します。片方のヘッドギアクリップを外し、マスククッション部分を片手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。



マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部ストラップは頬との間に
指が1本入る程度に緩めてください。



空気が漏れる場合

鼻周辺から空気が漏れる場合は
マスククッション下部にあるリーク
補正ダイヤルを左右に動かして
ください。



リーク補正ダイヤルを使用しても
空気漏れが補正できない場合は、
マスククッションを手でつかんで
浮かし、マスククッションの位置を
調整してください。



3 快適にご使用いただくためのヒント

ヘッドギアクリップはオプションです。
ヘッドギアのストラップを直接マスク
フレームのスロットに通すこともできます。



クイックリリースタブを押すと、ヘッドギア
からチューブが外れ、迅速に機器とマスク
を取り外すことができます。再び機器に
接続する際は、エルボを所定の位置に
カチッと音がするまで押し込みます。



チューブラップのチューブ固定ループに
チューブを通し、頭上に固定することが
できます。
固定中はクイックリリースタブを使用して
チューブを取り外さないでください。



取り外し方について


お子様の好みに合わせ、
マスクフレームを引き
上げて外すか、ヘッド
ギアをすべらせて外して
ください。



4 マスクの分解／組み立て

部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	<p>ヘッドギアのストラップ部分をマスクフレームから取り外します。</p>	<p>上部ストラップをマスクフレームの上段に通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通して取り付けます。</p>
チューブ	<p>クイックリリースタブを両側から押さえて引き離し、マスクフレームからチューブを外します。</p> 	<p>クイックリリースタブを両側から押さえながらマスククッションに取り付けます。</p> 
マスククッション	<p>マスクフレームから取り外します。</p> 	<p>リーク補正ダイヤルを下向きにして、マスクフレームの切り込みに合わせてはめ込みます。</p> 

SEエルボアクセサリ (オプション)

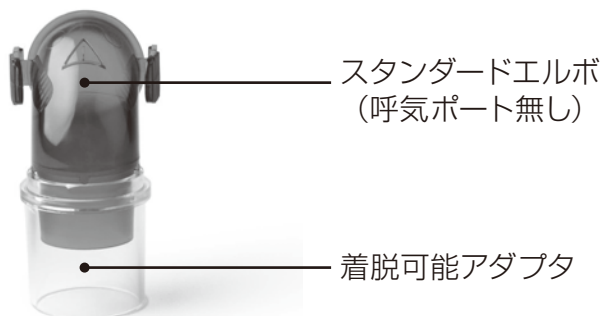**注意**

機器の電源が入っていない時にこのアクセサリを接続したマスクを使用すると、呼気を再呼吸するおそれがあります。数分以上の間、呼気を再呼吸すると、状況により窒息を生じることがあります。

エルボの取り付け方

クイックリリースタブが所定の位置でカチッと音がするまで、エルボをマスククッションに押し込みます。

※着脱可能アダプタを回路に接続する必要がある場合は、アダプタをスタンダードエルボに取り付けてください。

**エルボの取り外し方**





クイックリリースタブを両側から押さえて引き離し、マスクフレームからエルボを外します。



6

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

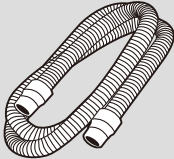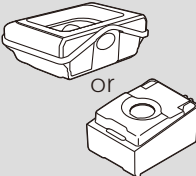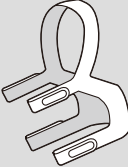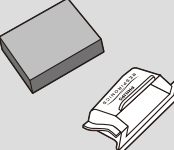頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。</p>
	 給水タンク	<p>中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。</p>
1週間	 ヘッドギア	<p>マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗います。</p>
2週間	 花粉フィルタ	<p>必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。</p>




注意

付属品（マスク・回路など）のお手入れする際は、以下のことをお守りください。



- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

7 フィルタの取り付け方法

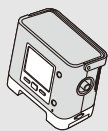



トリロジーplus シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図のようにセットします。

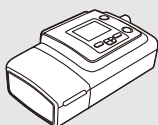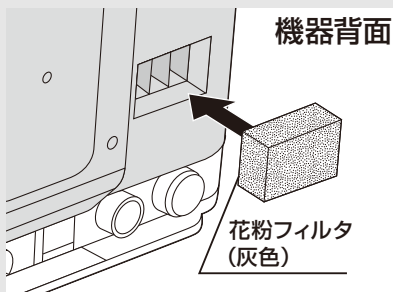


BiPAP A40システム シルバーシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際
は右図の順でセットします。

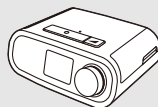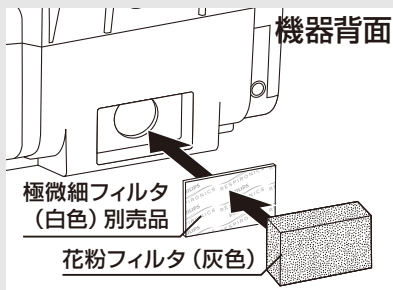

ドリーム ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

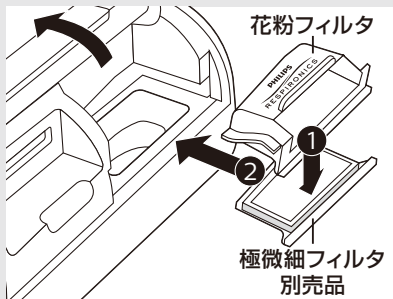

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

フィリップス・レスピロニクス
弊社WEBトップページから右記の
バナーをクリックしてアクセス





CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこぎゅう

0120-48-4159

受付時間 9:00~17:30

※日・祝日・年末年始 休業

人工呼吸器をお使いの方

昼間 地域営業所・出張所・駐在

受付時間 平日9:00~17:30

夜間休日 機器安全センター

0120-633-811

受付時間 平日17:30~翌9:00

土・日・祝祭日

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/healthcare

販売名: ウィスプ小児用ネーザルマスク

医療機器届出番号: 11B1X00022000109 一般医療機器

© 2017 Philips Respironics GK

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。

PN 1134118 170306 R1-S