

PHILIPS

Healthcare

DXR

DXR Cleaning and disinfection program

清掃と消毒は、定期的に行なう必要があります。ここでは、PhilipsのDXRにおける一般的なガイドラインについて説明します。製品および部屋の清掃と消毒方法については、適用される法律および規定にすべて従ってください。また、製品のクリーニングと消毒は、病院の方針に従って行ってください。

清掃 Cleaning

1. エナメル塗装部とアルミ製部分の清掃は**中性洗剤を含む布**で汚れを拭き取り、洗剤成分が残らないよう水拭き、乾拭きを行います。
※腐食性の洗剤、溶剤、研磨剤は絶対に使用しないでください。洗剤の特性が不明な場合は使用しないでください。
2. クローム部は、**乾いた布**で清掃を行ってください。研磨剤は使用しないでください。仕上げを維持するには、非研磨ワックスを使用します。
3. プラスチックの表面は**石鹼と水拭き**のみでの清掃を行ってください。他のクリーナーを使用すると(例. アルコール含有量が高いもの)素材が鈍くなったり、日々割れを起こしかねます。
4. タッチスクリーンは**標準のガラスクリーナー**で清掃することができます。ガラスクリーナーを布に塗布しタッチスクリーンを清掃し、タッチスクリーンの誤作動を防ぐために乾拭きを行ってください。汚れや指紋はタッチスクリーン操作に影響を与える可能性があります。

消毒 Disinfection

1. 患者に対して使用するものを含め、洗剤や消毒剤は、起爆性の混合気体を発生させることがあります。関連法規に従ってください。アクセサリや接続ケーブルなど、このような処理に適した部品は、**適切な薬剤で湿らせた布で消毒することができます**。
2. **腐食性の溶剤ベースの消毒剤や滅菌剤は絶対に使用しないでください**。消毒剤や殺菌剤の特性が不明な場合は使用をしないでください。
3. **可燃性または爆発の可能性のある消毒スプレーを使用しないでください**。スプレーを使用して医療製品のある部屋を消毒することはお勧めできません。スプレーの蒸気が製品内に進入し、電気系統のショートや金属の腐食など、製品に損傷を与えるおそれがあります。
4. どうしても、スプレーを使用して医療製品のある部屋を消毒する場合は、次の手順を行います。
 - 主電源からシステムを切断し、システムが冷却するまで待ちます。これにより、対流によってスプレーの蒸気が製品内に進入するのを防ぐことができます。
 - 製品全体をビニールのシートで覆います。
 - 消毒剤を噴きかけます。
 - 蒸気が完全に消散するまで待ちます。
 - ビニールのシートを外します。
 - 前述の推奨事項に従って、システムの表面を消毒します。
 - 蒸気が完全に消散するまで待ってから、システムの電源をオンにします。

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

お客様窓口 0120-556-494

03-3740-3213

受付時間 9:00 ~ 18:00

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

www.philips.co.jp/healthcare

© 2020 Philips Japan, Ltd.

