

フィリップス社除細動器の洗浄と消毒について

一般的な推奨事項

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を避けるために、病院と保健部門の方針で示されているように、感染対策を順守してください。世界保健機関（WHO）およびアメリカ疾病管理予防センター（CDC）からの推奨事項には、患者には陰圧隔離室、医療従事者には手袋、ガウン、マスクを使用することが含まれています。

洗浄

糸くず等、繊維の出ない柔らかい布か使い捨てのティッシュに洗浄剤をつけて、装置の表面全体と画面を拭き取ります。洗浄剤は、垂れない程度まで十分に染み込ませる必要があります。

消毒

糸くず等、繊維の出ない柔らかい布か使い捨てのティッシュに消毒剤をつけて、デバイスの表面全体を拭き取ります。消毒剤は、垂れない程度まで十分に染み込ませる必要があります。

完全な洗浄、消毒手順については、各機器の取扱説明書を参照してください。

製品	石鹼水	次亜塩素酸ナトリウム(3%)を含む塩素系漂白剤	次亜塩素酸ナトリウム(6%)を含む塩素系漂白剤	第4級アンモニウム塩(21%)	アンモニア系クリーナー(10%)	イソプロピルアルコール(70%)
ハートスタート HS1 ハートスタート HS1+	✓	✓	✗	✗	✓	✗
ハートスタート FRx ハートスタート FRx+	✓	✓	✗	✗	✓	✓
ハートスタート FR2+	✓	✓	✗	✗	✓	✓
ハートスタート FR3	✓	✓	✗	✗	✓	✓
ハートスタート XL	✓	✓	✗	✗	✗	✓
ハートスタート XL+	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Efficia DFM100	✓	✓	✗	✗	✗	✓
ハートスタート MRx	✓	✓	✗	✓	✗	✓